

リオネット補聴器史上、
最小最軽量*

高出力補聴器「HB-P1」誕生。

9 Colors Lineup

*リオネット補聴器のPR44電池を使用した高度・重度難聴用耳かけ型補聴器の中において(2016年6月現在)

| 4つのポイント |

リオネット補聴器史上、 最小最軽量* 高出力補聴器 「HB-P1」誕生。

HB-P1PC/HB-P1PS/HB-P1PL

高度・重度難聴向け補聴器「HB-P1」は、
高出力補聴器の中でも
より小型なものを望まれている方々に向けて
開発された補聴器です。

最小
最軽量*

快適性

耐汗

耐
衝撃性

*リオネット補聴器のPR44電池を使用した高度・重度難聴用耳かけ型補聴器の中において
(2016年6月現在)

9

Colors
Lineup



BLACK



DARK GREEN



BEIGE



PINK



LIGHT PURPLE



ORANGE



YELLOW



BLUE



LIGHT BLUE

最小
最軽量

体積約25%、 重量約20%ダウン

リオネットの高出力補聴器の同等出力機種に比べ、
電池サイズを変えずに、小型・軽量化に成功。
毎日使うものだから、少しでも小さく軽く、
あなたの負担を最小限に抑えます。

快適性

高度・重度難聴に 対応したゆとりある出力

中等度・高度・重度難聴に対応し、
ゆとりある出力・利得を持った
頼もしいデジタル補聴器です。

体積

約25%
ダウン


重量

約20%
ダウン

従来の機種と同等出力で
小型・軽量化に成功。



耳かけ型デジタル補聴器の適応範囲の比較イメージ

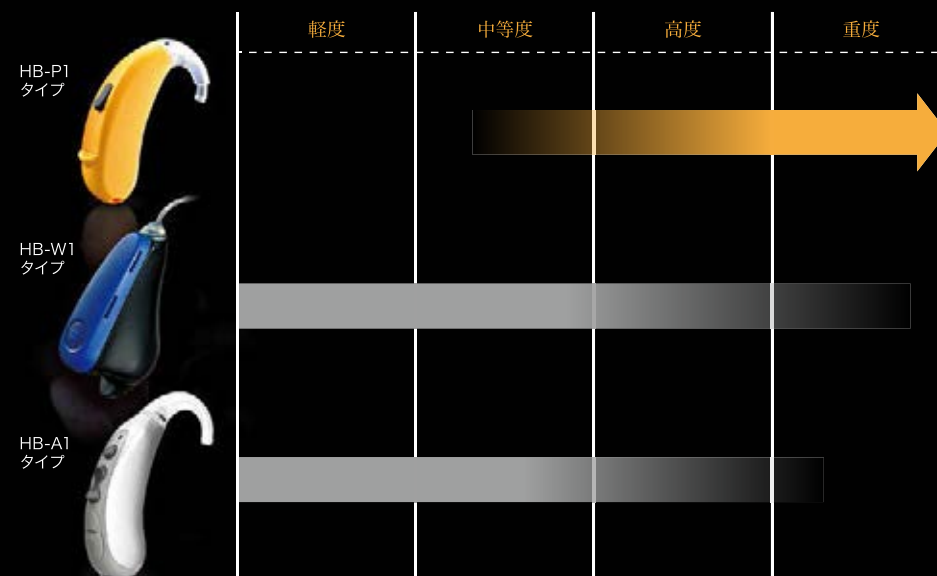

※当社比 (2016年5月現在)

耐汗

汗や湿気に強い

耐汗コートを採用。

汗による劣化を軽減します。

補聴器表面だけでなく、内部までコーティングすることで

耐久性を高めました。

耐汗コート



多湿な日本の環境にも耐えるコーティング。



快適性

不快な雑音や、 大きすぎる音を抑制

不快な雑音やピーピー音、突発的な衝撃音を抑制。

日常会話からビジネスシーンに至る様々な場面まで、聞こえをサポートします。

また、マルチチャンネルOPCを搭載し

大きくて不快な音に対しても細かい設定ができます。

※型式によりデジタル信号処理の細かさが異なります。

デジタル信号処理

不快音
ノイズ
大きい音



デジタル信号
処理された
快適な聞こえ

【パルスノイズサプレッサー】
食器を洗う「カチャカチャ」といった突発的な衝撃音を抑制。

【サウンド・スペクトル・シェイピング】
音のメリハリを調整し、より聞きとりやすい音に。

【ハウリングキャンセラー】
不快なピーピー音を自動的に抑制。

【ノイズリダクション】
定常的な騒音を低減し、騒がしい場所でも快適に。

【マルチチャンネルOPC】
大きすぎる音をしっかり抑制。

快適性

電池の⊕⊖ OK、 「おまかせ回路」

電池の＋－を気にせず

交換可能な“おまかせ回路”を搭載。

また、電池1つで約460時間の使用を実現しました。

耐
衝撃性

部品から見直した、 高い耐衝撃性

部品から見直し、耐衝撃性を向上。

アクティブな方でも安心してお使いいただけます。

連続使用

約460時間※

※設定や使用環境によって変わります。



耐衝撃性

耐衝撃性
向上



主な機能一覧

★の数は、3機種の中での機能の高さを相対的に比較して表しています。

カラーラインアップ(全9色)



型式		ハイパワーシリーズⅡ		
		ハイグレードモデル HB-P1PC	ベーシックモデル HB-P1PS	シンプルモデル HB-P1PL
希望小売価格	片耳価格(1台)	198,000円	158,000円	118,000円
	両耳価格(2台)	356,400円 (1台あたり178,200円)	284,400円 (1台あたり142,200円)	212,400円 (1台あたり106,200円)
聴力に合わせて細かく調整できる		10バンド4チャンネル	8バンド4チャンネル	6バンド2チャンネル
ピーピー音を抑える		★★★★	★★★★	★★★★
周囲の騒音を低減		★★★★	★★★★	★★★★
突発的な衝撃音を抑える		★★★★	★★★★	★★★
大きすぎる音をしっかり抑える		★★★★	★★★	★
言葉をより聞きとりやすくする		★★★★	★★★	—
スタートメモリー設定機能		★★★★	—	—
使用環境の記録・分析		★★★★	★★★★	—
FM補聴システム対応 ^{*1} /外部入力機能 ^{*1}		★★★★	★★★★	★★★★
イヤホンクロス ^{*1*2}		★★★★	★★★★	★★★★
共通機能		耐汗コート、おまかせ回路、スタート時間設定機能、ミュート機能、 おしらせ音、LEDユニット(オプション)、携帯電話ノイズ対策、誘導コイル		

●補聴器は非課税です。 *1 接続シュー付き電池ホルダー(CC-P1)が必要です。 *2 当社工場での仕様変更が必要です。
*1、*2についての詳細は販売店までお問い合わせください。

性能一覧/保証

型式:HB-P1PC / HB-P1PS / HB-P1PL

JIS C 5512:2015 (2cm³カプラ)による(*は除く)

最大音響利得	HFA	[±5 dB]	70 dB
	ピーク値	[+3 dB以下]	79 dB
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	[±4 dB]	130 dB
	ピーク値	[+3 dB以下]	138 dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6 dB]			100 dB
電池			PR44
電池寿命*			約460時間
適応難聴*	中等度・高度・重度 (60~120 dBHL) 伝音難聴・感音難聴・混合性難聴		

● []内は許容差を表します。
● 電池寿命は使用条件により異なります。

[参考]JIS C 5512:2000 (密閉形擬似耳)による。

規準周波数		1600 Hz
最大音響利得		77 dB±5dB
90dB最大出力音圧レベル	1600Hz	138 dB±5dB
	500Hz	134 dB
	ピーク値	147 dB以下
誘導コイル入力の最大感度		109 dB±6 dB
使用電池		PR44
電池寿命		約535時間
適応難聴	中等度・高度・重度 (60~120 dBHL) 伝音難聴・感音難聴・混合性難聴	

● 電池寿命は使用条件により異なります。

リオネットならではの充実した保証制度

保証1

2年間の無料修理

お買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。


保証2

火災、盗難などにあったときの事故保険

補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

本 社 ・ 営 業 部	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7880 FAX.042-359-7441	〒185-8533
東 京 営 業 所	東京都文京区本郷2-27-8 (太陽館ビル) TEL.03-3818-4133 FAX.03-3818-4140	〒113-0033
仙 台 営 業 所	仙台市太白区南大野田25-13 TEL.022-249-5533 FAX.022-249-5535	〒982-0015
西 日 本 営 業 所	大阪市北区梅田2-5-5 (横山ビル) TEL.06-6363-4133 FAX.06-4797-0111	〒530-0001
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7833 FAX.042-359-7440	〒185-8533
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木2-7-7 (南新宿277ビル) TEL.03-3379-9333 FAX.03-3379-2564	〒151-0053
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田2-5-5 (横山ビル) TEL.06-4797-0033 FAX.06-4797-0111	〒530-0001

関 東 リ オ ン (株)	さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL.048-824-1205 FAX.048-824-8885	〒330-0062
東 海 リ オ ン (株)	名古屋市中区新栄町2-9 (スカイオアシス栄ビル) TEL.052-954-1733 FAX.052-954-1734	〒460-0004
九 州 リ オ ン (株)	福岡市博多区冷泉町5-18 TEL.092-281-5361 FAX.092-291-2847	〒812-0039

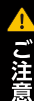

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名:補聴器HB-P1PC 医療機器認証番号:228AABZX00062000
販売名:補聴器HB-P1PS 医療機器認証番号:228AABZX00062A02

販売名:補聴器HB-P1PL 医療機器認証番号:228AABZX00062A01



この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

※このカタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※このカタログ掲載の各商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※このカタログは、環境に配慮したベジタブルオイルインキを使用しています。
※このカタログ掲載の商品の希望小売価格はあくまでも参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。