

冬場の

# 補聴器用空気電池 使用上のご注意！



（空気電池は、プラス極に空気中の酸素を使うため、気温が低く乾燥している冬場のご使用時には以下のようなご注意をお願いいたします。）

1

火気を用いる暖房機器を使用する場合や、多くの人がいる部屋では換気を充分に行ってください。

[石油ストーブやガスストーブなどの暖房機器から発生する二酸化炭素により電解液が劣化します。]

2

電池が冷えている場合は、体温で少し暖めてからご使用ください。

[気温が低く、本来の電池性能が十分に発揮できません。]