

HX-A8 充電ケース 安全上のご注意

Web サイトより取扱説明書が
ダウンロードできます。
[https://www.rionet.jp/product/
manual/rionet2/hxa8/web](https://www.rionet.jp/product/manual/rionet2/hxa8/web)




- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書は適切に保管し、必要なときにご利用ください。

充電ケースにできること

本器は補聴器 HB-A8 のオプションで、補聴器の電源を入／切・充電・保管・持ち運びをするためのケースです。

各部の名称

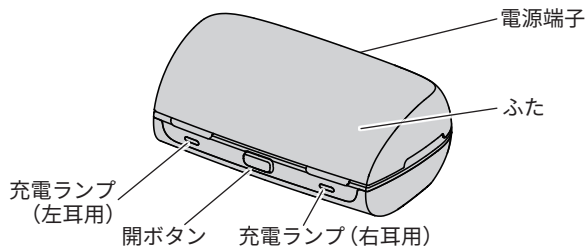

付属品

- 安全上のご注意 (本書)
- AC アダプター
- AC アダプター用ケーブル

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

図の中に具体的な禁止内容が表記されることがあります。

	禁止内容		指示内容
--	------	--	------

	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

■ 一般的な取り扱いについて

警告

火中への投入や分解はしない。
 破裂するおそれがあります。

充電ケースに金属などの異物を入れない。
 火災、故障の原因となります。

本器は電波を発します。植込み型医療機器 (植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器) を使用している方は、植込み部位に対して本器を密着させない。
植込み型医療機器に異常が生じるおそれがあります。

注意

高温になる場所に放置しない。
 発火などの原因となります。

濡れた手で AC アダプターの抜き差しはしない。
 感電などの原因となります。



PNQX9254YA/M1


! 本器には必ず付属の AC アダプターと AC アダプター用ケーブルを使用する。

市販の AC アダプターやコンピュータの USB 端子には接続しないでください。発火や感電などのおそれがあります。

使用方法 (充電)


充電

- ① 充電ケースと付属の AC アダプター、AC アダプター用ケーブルをつないで、コンセントに接続します。

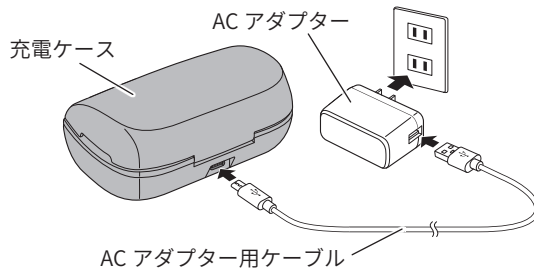


- ② 補聴器を充電ケースにセットします。

充電ケースの左側 (青印) 側に左耳用補聴器、右側 (赤印) 側に右耳用補聴器をセットしてください。

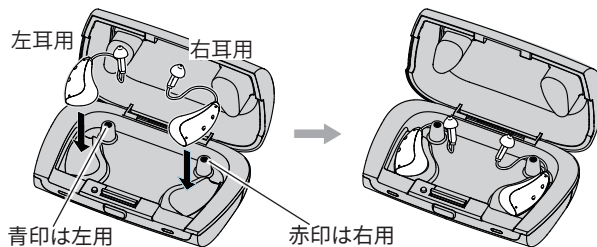

- ③ 充電ケースのふたを閉じると、充電が開始されます。

充電中は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。
充電が完了すると、充電ランプが青色に点灯します。
充電時間：最大約 4 時間

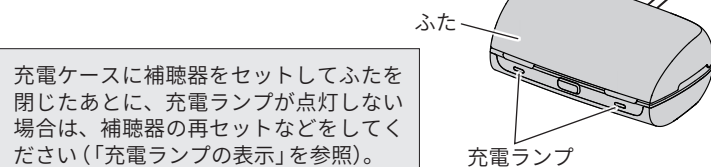

充電ケースに補聴器をセットしてふたを閉じたあとに、充電ランプが点灯しない場合は、補聴器の再セットなどをしてください (「充電ランプの表示」を参照)。

1年保証 充電ケース保証書

お 買 い 上 げ 機 種	HX-A8		
製 造 番 号	No.		
お 買 い 上 げ 年 月 日	年	月	日
保 証 期 間	年	月	日まで
お と ころ	〒		
お な ま え	ふりがな	で ん ね	()
	様	わ	

お買い上げの日より1年間に故障が発生した場合、保証規定のとおり保証いたします。
お買い上げのお店にご連絡ください。本保証書のご提示がない場合には有料とさせていただきます。

お問い合わせ先



リオン株式会社

本社・営業部
〒 185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41
リオネット補聴器お客様コールセンター
フリーダイヤル：0120-2933-76
受付時間：9:00～21:00

販売店名・印


使用方法 (電源の入／切、保管・持ち運び)

電源の入／切

充電ケースに内蔵された磁石によって、補聴器の電源が入／切します。

電源を入れる


充電ケースにセットされた補聴器を取り外すと、電源が入ります。

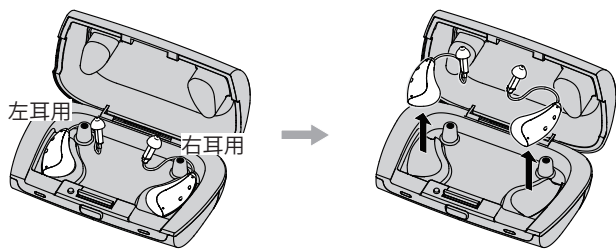

電源を切る


補聴器を充電ケースにセットすると、電源が切れます。

充電ケースの左側に左耳用補聴器、右側に右耳用補聴器をセットしてください。

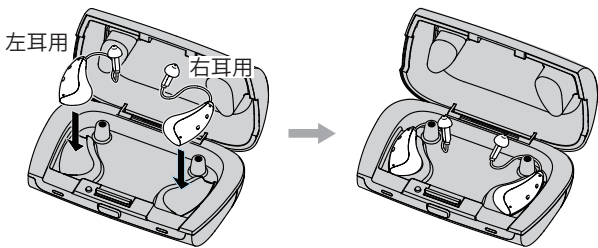

保管・持ち運び

補聴器をしばらく使わないときや持ち運ぶときは、充電ケースにセットします。充電ケースの左側に左耳用補聴器、右側に右耳用補聴器をセットしてください。

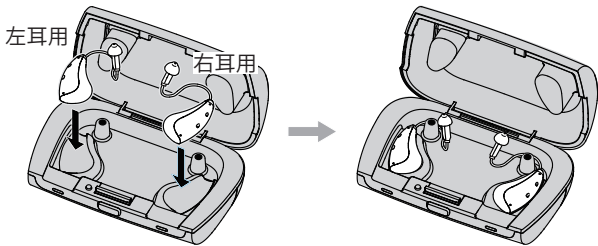

【保証規定】

① 無料修理[表記のお買い上げ年月日より 1 年間]

保証期間中に故障が生じた場合、下記に該当するものを除き、無料修理させていただきます。

- 保証書欄の記載がないもの。または書き換えられているもの。
- 販売店名の印がないもの。
- 取扱説明書によらない使い方をされたとき、あるいは改造されたとき。
- お買い上げ以降のお客様の責任による故障。
- 本体の部品、付属品、消耗品。
- 天災地変(地震、噴火、風水害など)、不可抗力による故障。

② ご贈答品、ご転居などにより保証が受けられない場合は、弊社または販売店へご連絡ください。お近くのサービス店をご紹介します。

③ 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

④ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.)

⑤ 本保証書の提示がない場合は、有料となります。

⑥ 本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理など、ご不明の場合は、弊社または販売店までご連絡ください。

使用上の注意

<取り扱い・保管>

- 補聴器を充電ケースにセットする前に、補聴器と充電ケースの汚れや水分を乾いた布などで拭き取ってください。
- 補聴器を入れた状態で充電ケースを落とすと、充電ケースにセットした補聴器が外れるおそれがあります。補聴器が外れた際は、補聴器をセットし直してください。
- 補聴器を左右逆にセットしないでください。E ワイヤーが変形し、故障するおそれがあります。
- 補聴器の電源を入／切するときは、必ず充電ケースで行ってください。
- 充電中には充電ケースに磁気記録媒体(フロッピーディスク、各種カード類、磁気テープ、プリペイドカード、切符など)を近づけないでください。充電中は充電ケースから磁場が発生するため、磁気記録媒体が故障することがあります。
- 補聴器に、充電ケース以外の強力な磁石を近づけないでください。故障するおそれがあります。

<免責事項>

- 地震・雷・風水害および火災、第三者による行為その他の事故、お客さまの故意または過失誤用、その他異常な条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 充電ケースの使用または使用不能から生じる記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断などの付随的な損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。

<廃棄するときのお願い>

- 充電ケースの廃棄方法は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

充電ランプの表示

ランプの表示	状態	対応
オレンジ 点灯	充電中	
青 点灯	充電完了	
消灯	充電されていない	下記を確認してください ・補聴器が充電ケースに正しくセットされている ・ふたが閉まっている ・ケーブル類がつながっている
オレンジ 点滅	充電エラー (ふたを開けたら消灯の場合)	下記の順に確認してください ・補聴器をセットし直して再充電 ・充電ケースの置き場所を変えて再充電
	故障の可能性 (ふたを開けても点滅の場合)	お買い求めのお店にご相談ください

※ それでも症状が改善されない場合は、お買い求めのお店にご相談ください

仕様

※ AC アダプター、AC アダプター用ケーブルを充電ケースにつなげた状態

補聴器充電時間	最大 約 4 時間 (新品の充電電池の場合)
使用温度範囲	0～45℃ (推奨 7～35℃※)
本体の寸法	約 64 × 104 × 41 mm
本体の質量	約 90 g

※ 推奨温度範囲外では、充電時間が長くなります。

AC アダプター (待機消費電力0.3 W以下)	電源	AC 100～240 V 50/60 Hz
	入力容量	10 VA (100 V) 13 VA (240 V)
	DC 出力	5.0 V 800 mA

AC アダプター 表示記号	□	クラス II 機器 (二重絶縁構造)
	～	AC (交流)
	---	DC (直流)



<https://www.rion.co.jp/>

本社・営業部

〒185-8533 東京都分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル：0120-2933-76

受付時間：9:00～21:00