

## HX-C7 充電ケース

### 安全上のご注意

Web サイトより取扱説明書をダウンロードできます。  
<https://www.rionet.jp/product/manual/rionet2/hxc7/web>




- お買い上げいただきありがとうございます。補聴器をお使いになる前に、取扱説明書と「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくお使いください。
- 本書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

### 充電ケースにできること

本器は補聴器 HI-C7 のオプションで、補聴器の電源を入/切・充電・保管・持ち運びをするためのケースです。

### 各部の名称

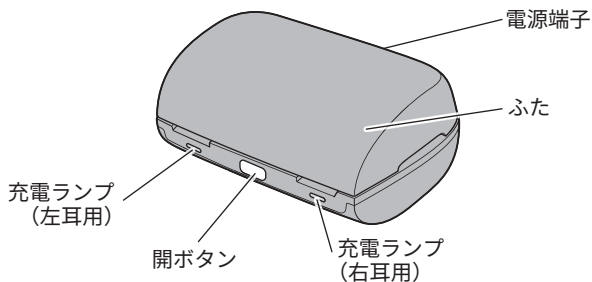

### 付属品

- 安全上のご注意 (本書)
- AC アダプター
- AC アダプター用ケーブル
- 左右識別シール

### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

#### 絵表示の例

図の中に具体的な禁止内容が表記されることがあります。

	禁止内容		指示内容
--	------	--	------

	<b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

#### 一般的な取り扱いについて

### 警告

- 火中への投入や分解はしない。  
破裂するおそれがあります。  
充電ケースに金属などの異物を入れない。  
火災、故障の原因となります。


### 注意

- 本器には必ず付属の AC アダプターと AC アダプター用ケーブルを使用する。  
市販の AC アダプターやパソコンの USB 端子には接続しないでください。  
発火や感電などのおそれがあります。
- 本器の端子をショートさせたり、高温になる場所に放置したりしない。  
発火や感電などの原因となります。  
濡れた手で AC アダプターの抜き差しはしない。  
感電などの原因となります。

### 充電


- ① 充電ケースと付属の AC アダプター、AC アダプター用ケーブルを組み立て、コンセントに接続します。

AC アダプター、AC アダプター用ケーブル、充電ケース、コンセントがつかっていないと補聴器の充電ができません。

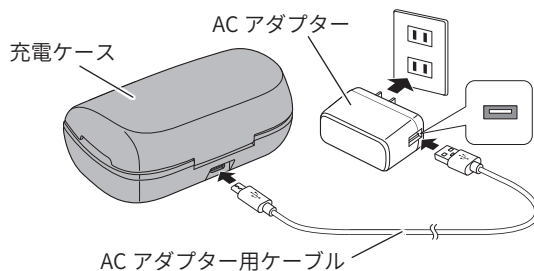

- ② 補聴器を充電ケースにセットします。


充電ケースの左側に左耳用補聴器、右側に右耳用補聴器を配置してください。なお、補聴器の取り出しワイヤーは充電ケースの穴に入れてください。

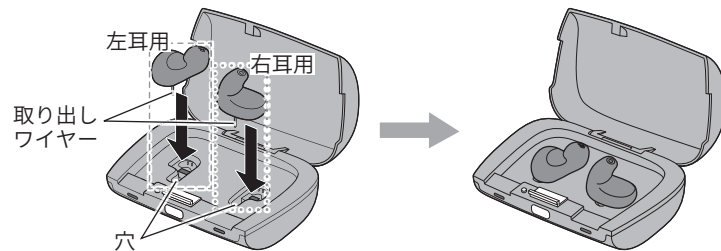

- ③ 充電ケースのふたを閉じると、充電が開始されます。

充電中は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。  
充電が完了すると、充電ランプが青色に点灯します。  
充電時間目安：最大約 2.5 時間

充電ケースに補聴器をセットしてふたを閉じたあとに、充電ランプが点灯しない場合は、補聴器の再セットなどをしてください(「充電ランプの表示」を参照)。

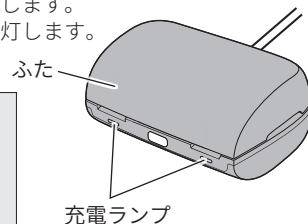

### 1年保証 充電ケース保証書

お買い上げ機種	HX-C7		
製造番号	No.		
お買い上げ年月日	年	月	日
保証期間	年	月	日まで

おとこ 千

おなまえ ぶりかな 様 でんわ ( )

お買い上げの日より1年間に故障が発生した場合、保証規定のとおり保証いたします。お買い上げのお店にご連絡ください。本保証書のご提示がない場合には有料とさせていただきます。

お問い合わせ先	<b>リオ株式会社</b> 本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41 リオネット補聴器お客様コールセンター フリーダイヤル 0120-2933-76 受付時間：9:00～21:00
---------	--

販売店名・印


## 使用方法 (電源の入/切、保管・持ち運び)

### 電源の入/切

充電ケースに内蔵された磁石によって、補聴器の電源が入/切します。

### 電源を入れる

充電ケースにセットされた補聴器を取り外すと、電源が入ります。

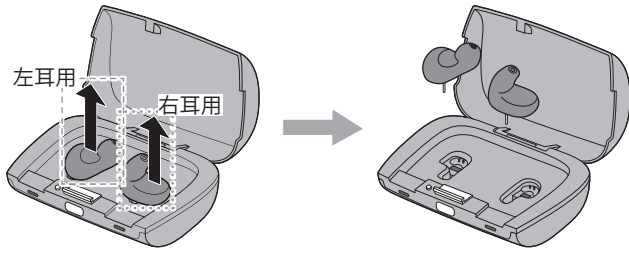


### 電源を切る

補聴器を充電ケースにセットすると、電源が切れます。

充電ケースの左側に左耳用補聴器、右側に右耳用補聴器を配置してください。

なお、補聴器の取り出しワイヤーは充電ケースの穴に入れてください。

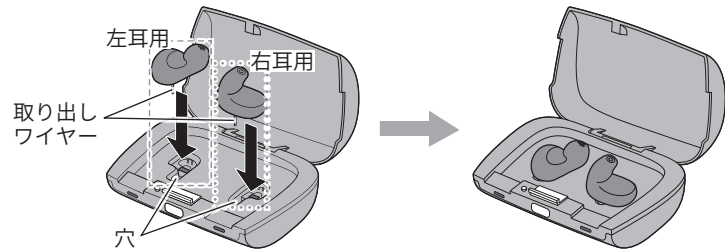


### 保管・持ち運び

補聴器をしばらく使わないときや持ち運ぶときは、充電ケースにセットします。

充電ケースの左側に左耳用補聴器、右側に右耳用補聴器を配置してください。

なお、補聴器の取り出しワイヤーは充電ケースの穴に入れてください。

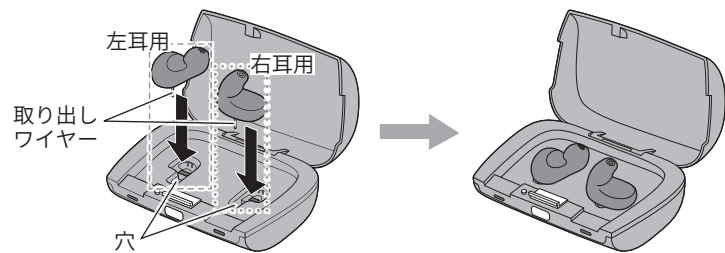

### 【保証規定】

① 無料修理[表記のお買い上げ年月日より1年間]:保証期間中に故障が生じた場合、下記に該当するものを除き、無料修理させていただきます。

- 保証書欄の記載がないもの。または書き換えられているもの。
- 販売店名の印がないもの。
- 取扱説明書によらない使い方をされた場合、あるいは改造された場合。
- お買い上げ以降のお客様の責任による故障。
- 本体の部品、付属品、消耗品。
- 天災地変(地震、噴火、風水害など)、不可抗力による故障。

② ご贈答品、ご購入などにより保証が受けられない場合は、弊社または販売店へご連絡ください。お近くのサービス店をご紹介します。

③ 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

④ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.)

⑤ 本保証書の提示がない場合は、有料となります。

⑥ 本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理など、ご不明の場合は、弊社または販売店までご連絡ください。

## 使用上の注意

### <取り扱い・保管>

- 補聴器を充電ケースにセットする前に、補聴器の汚れや水分を乾いた布などで拭き取ってください。特に、補聴器の充電端子はきれいにしてください。
- 充電ケースについての汚れや水分は、乾いた布などで拭いてください。特に、補聴器と接触する部分はきれいにしてください。
- 補聴器を入れた状態で充電ケースを落とすと、充電ケースにセットした補聴器が外れることがあります。補聴器が外れた際は、補聴器をセットし直してください。
- 補聴器の取り出しワイヤーが曲がっていると、正常に充電ケースにセットできないことがあります。取り出しワイヤーが曲がっていないことを確認してください。
- 補聴器の電源を入/切するときは、必ず充電ケースで行ってください。
- 補聴器に、充電ケース以外の強力な磁石を近づけないでください。故障することがあります。

### <免責について>

- 地震・雷・風水害および火災、第三者による行為その他の事故、お客さまの故意または過失誤用、その他異常な条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本器の使用または使用不能から生じる記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断などの付随的な損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。

### <廃棄するときのお願い>

- ご使用済みの本器の廃棄方法は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

## 充電ランプの表示

ランプの表示	状態	対応
オレンジ点灯	充電中	
青点灯	充電完了	
消灯	補聴器がセットされていない、または他の原因で充電されていない	下記を確認してください ・ケーブル類がつながっている ・ふたが閉まっている ・補聴器が正しくセットされていない ・充電端子が汚れていない それでも症状が改善されない場合は、お買い求めのお店にご相談ください
オレンジ点滅	充電されていない(補聴器からの異常信号)	お買い求めのお店にご相談ください

## 仕様 ※ ACアダプター、ACアダプター用ケーブルを充電ケースにつなげた状態

補聴器充電時間	最大約 2.5 時間	
本体の寸法	約 64 × 104 × 41 mm	
本体の質量	約 85 g	
ACアダプター (待機消費電力0.3W以下)	電源	AC 100 - 240 V 50/60 Hz
	入力容量	10 VA (100 V) 13 VA (240 V)
	DC 出力	5.0 V 800 mA
ACアダプター 表示記号	□	クラス II 機器 (二重絶縁構造)
	~	AC (交流)
	---	DC (直流)

 **リオン株式会社**

<https://www.rion.co.jp/>

本社・営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-2933-76

受付時間：9:00~21:00