

RH-07 テレビアダプター 安全上のご注意

Web サイトより取扱説明書が
ダウンロードできます。
[https://www.rionet.jp/product/
manual/rionet2/rh07/web](https://www.rionet.jp/product/manual/rionet2/rh07/web)




- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書は適切に保管し、必要なときにご利用ください。

テレビアダプターにできること

テレビアダプターはリオネット2シリーズの別売品で、テレビ音声を補聴器に送信できます。テレビアダプターを経由したテレビの音声を直接補聴器に届けるため、テレビ音声が聞き取りやすくなります。テレビアダプターを使用するには、リモコンまたはスマートコントロール2がインストールされたスマートフォンが必要です。

各部の名称

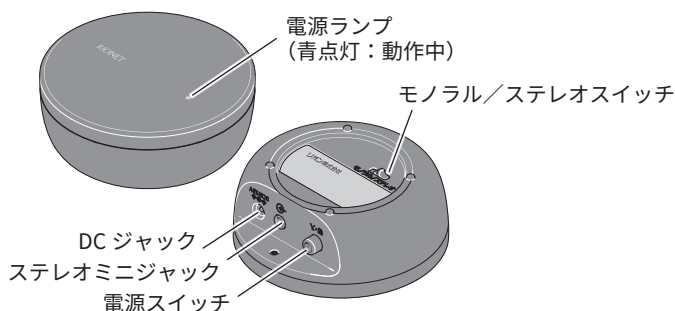

付属品

- 安全上のご注意（本書） ● オーディオケーブル
- AC アダプター ● AC アダプター用ケーブル

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いにより生じるおそれがある内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

図の中に具体的な禁止内容が表記されることがあります。

	禁止内容		指示内容
--	------	--	------

	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

■ 植込み型医療機器をご使用の方へ

警告

- 本器は電波を発します。植込み型医療機器（植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器）を使用している方は、**植込み部位に対して本器を密着させない。**
植込み型医療機器に異常が生じる可能性があります。

■ 一般的な取り扱いについて

警告

- 火中への投入や分解はしない。
破裂するおそれがあります。



PN0X9246XA/M1

注意

- 本器には必ず付属の AC アダプターを使用する。
市販の AC アダプターやコンピュータの USB 端子には接続しないでください。発火や感電などのおそれがあります。

■ 電磁波を発する機器（本器）の使用制限について

注意

- 本器を使用する前に、電子機器または電磁波を発する機器の使用制限がないかどうか確認する。
本器から発生する電波は、電子機器に影響を及ぼすおそれがあります。

航空機内では機内の指示に従い、必要により、本器の電源を切る。

電波に関する注意事項

- 本器は電波法に基づく「2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム」の無線設備として、工事設計の認証を受けた部品を採用しています。
- 本器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が使用されています。
 - ① 本器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ② 万一、本器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉（混信など）が発生した場合には、本器の電源を切り、弊社営業部にご連絡ください。
 - ③ その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社営業部にご連絡ください。
- 本器を使用するときには無線局の免許は必要ありません。
- 本器は日本国内でのみ使用できます。
- 分解／改造などを行うと、法律で罰せられることがあります。
- 本器から送信された音声が補聴器に聞こえないなどの症状が起る場合は、電波の混信が原因である場合があります。このような場合にも弊社営業部にご連絡ください。

2.4XX6 帯域 : 2.4 GHz 帯
変調方式 : その他の方式 (GFSK 方式)
与干渉距離 : 60 m 以下
移動体識別装置の帯域の回避 : 全帯域／回避不可

1年保証 テレビアダプター保証書

お 買 い 上 げ 機 種	RH-07		
製 造 番 号	No.		
お 買 い 上 げ 年 月 日	年	月	日
保 証 期 間	年	月	日まで
お と ころ	〒		
お な ま え	ふりがな	でんわ	()
お買い上げの日より1年間に故障が発生した場合、保証規定のとおり保証いたします。お買い上げのお店にご連絡ください。本保証書のご提示がない場合には有料とさせていただきます。		様	
お問い合わせ先		リオネット株式会社 本社・営業部 〒 185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41 リオネット補聴器お客様コールセンター フリーダイヤル：0120-2933-76 受付時間：9:00～21:00	

販売店名・印

使用上のご注意

- テレビアダプター使用時は、補聴器の連続駆動時間が短くなります。

<免責事項>

- 地震・雷・風水害および火災、第三者による行為その他の事故、お客さまの故意または過失誤用、その他異常な条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- テレビアダプターの使用または使用不能から生じる記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断などの付随的な損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。

<お手入れについて>

- テレビアダプターについた汚れや水分は、乾いた布などで拭いてください。

<廃棄するときのお願い>

- ご使用済みのテレビアダプターの廃棄方法は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

通信距離

通信距離：10 m^{*}

※ 弊社測定条件による

テレビアダプターから補聴器に音声を送信できる距離は、お使いの環境により大きく変化します。
たとえば、テレビアダプターと補聴器の間に人体、家具、壁などの障害物があると通信できる距離は短くなる場合があります。

仕様

■ テレビアダプター

寸法	Φ80×36 mm
質量	約 70 g

■ AC アダプター

入力	AC 100～240 V 50/60 Hz 0.2 A 10 VA (100 V) 13 VA (240 V)
出力	DC 5 V 800 mA
AC アダプター表示記号	 クラスⅡ機器 (二重絶縁構造) ～ AC (交流) == DC (直流)

【保証規定】

- ① 無料修理[表記のお買い上げ年月日より 1 年間]


保証期間中に故障が生じた場合、下記に該当するものを除き、無料修理させていただきます。

- 保証書欄の記載がないもの。または書き換えられているもの。
 - 販売店名の印がないもの。
 - 取扱説明書によらない使い方をされた場合、あるいは改造された場合。
 - お買い上げ以降のお客様の責任による故障。
 - 本体の部品、付属品、消耗品。
 - 天災地変(地震、噴火、風水害など)、不可抗力による故障。
- ② ご贈答品、ご転居などにより保証が受けられない場合は、弊社または販売店へご連絡ください。お近くのサービス店をご紹介します。
- ③ 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ④ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.)
- ⑤ 本保証書の提示がない場合は、有料となります。
- ⑥ 本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理など、ご不明の場合は、弊社または販売店までご連絡ください。

テレビアダプターを設置する

テレビアダプターを使用するには、テレビアダプターとリモコンかスマートコントロール 2 とのペアリングが必要です。詳しくはテレビアダプターの取扱説明書をご覧ください。

- ① 付属の AC アダプター用ケーブルと AC アダプターを接続し、コンセントにつなぎます。

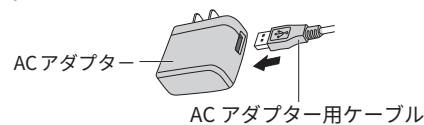


- ② 付属のオーディオケーブルで、テレビアダプターとテレビをつなぎます。

テレビにヘッドホン端子がある場合

オーディオケーブルをテレビのヘッドホン端子に接続します。


※ヘッドホン端子を使用する場合、テレビのスピーカーから音声がなくなることがあります。

※テレビの機種によっては、スピーカーとイヤホン音声の同時出力が可能なものがあります。

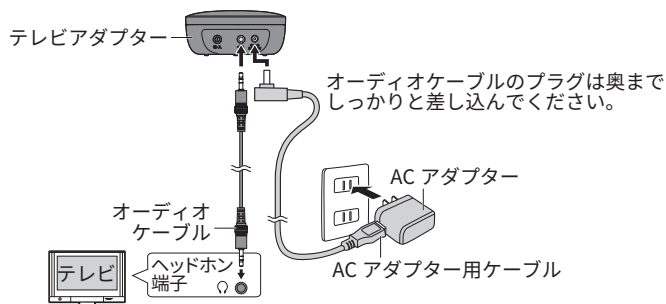


テレビにモニター出力端子がある場合

オーディオケーブルと変換コードを組み合わせで接続します。

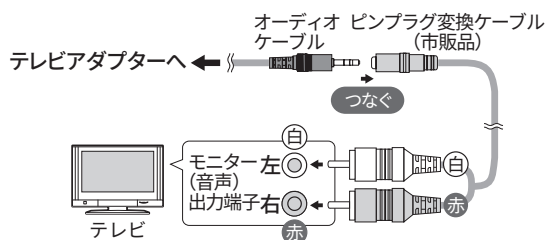

- ③ テレビアダプターの電源スイッチを入れます。
電源ランプが数秒間点滅後、点灯します。
点灯後、音声のワイヤレス送信が開始されます。
※点灯に変わらない場合は、オーディオケーブルなどの音声接続コードのプラグを奥までしっかりと差し込んでください。

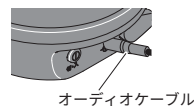

- ④ リモコンまたはスマートフォン用補聴器調整アプリ(スマートコントロール 2)で、受信操作します。
以下は補聴器、リモコン、テレビアダプターのペアリングを行った後の手順です。詳細はテレビアダプターの取扱説明書をご覧ください。

モノラル／ステレオ

背面のスイッチを「モノラル」に切り替えると、左右の音をミックスして聞くことができます。補聴器を片耳装用されている方は、「モノラル」を、両耳装用されている方は「モノラル／ステレオ」をお好みで選択してください。

- Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、リオン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。



<https://www.rion.co.jp/>

本社・営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル：0120-2933-76

受付時間：9:00～21:00