

## RH-08 リモコン

### 安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書は適切に保管し、必要なときにご利用ください。


Web サイトより取扱説明書をダウンロードできます。  
<https://www.rionet.jp/product/manual/rionet2/rh08/web>



## リモコンにできること

本器は補聴器 HI-C7、HB-A8 の音量調節、メモリー（音質）の切り替え、ミュート／ミュート解除ができるリモコンです。

## 各部の名称

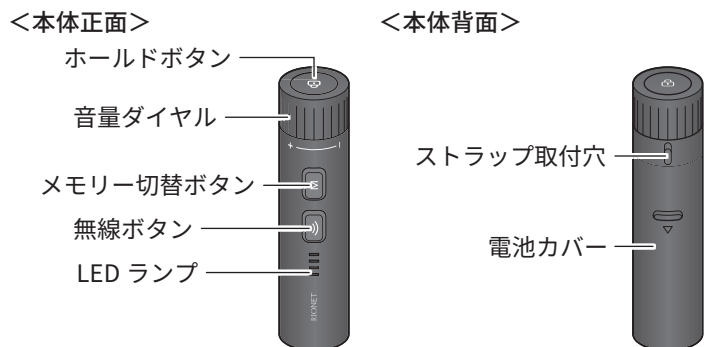

## 付属品

- 安全上のご注意（本書）

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

### 絵表示の例

図の中に具体的な禁止内容が表記されることがあります。

	禁止内容		指示内容
--	------	--	------

	<b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

### ■ 植込み型医療機器をご使用の方へ

#### 警告

- 本器は電波を發します。植込み型医療機器（植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器）を使用している方は、植込み部位に対して本器を密着させない。植込み型医療機器に異常が生じることがあります。

### ■ 電磁波を發する機器（本器）の使用制限について

#### 注意

- 本器を使用する前に、電子機器または電磁波を發する機器の使用制限がないかどうか確認する。本器から發生する電波は、電子機器に影響を及ぼすおそれがあります。航空機内では機内の指示に従い、必要により、本器の電源を切る（リモコンは、操作しないと 60 秒後、自動的に電源が切れます）。



PN0X9Z36X0M1d

## 電波に関する注意事項

- 本器は電波法に基づく「2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム」の無線設備として、工事設計の認証を受けた部品を採用しています。
- 本器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が使用されています。
  - ① 本器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
  - ② 万一、本器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉（混信など）が発生した場合には、本器の電源を切り、弊社営業部にご連絡ください。
  - ③ その他、本器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社営業部にご連絡ください。
- 本器を使用するときには無線局の免許は必要ありません。
- 本器は日本国内でのみ使用できます。
- 分解／改造などを行うと、法律で罰せられることがあります。
- 本器で補聴器が操作できないなどの症状が起こる場合は、電波の混信が原因である場合があります。このような場合にも弊社営業部にご連絡ください。

<b>2.4XX1</b>	帯域	: 2.4 GHz 帯
	変調方式	: その他の方式 (GFSK 方式)
	与干渉距離	: 10 m 以下
	移動体識別装置の帯域の回避	: 全帯域／回避不可

### 1年保証 リモコン保証書

お買い上げ機種	RH-08		
製造番号 No.			
お買い上げ年月日	年	月	日
保証期間	年	月	日まで
おところ	〒		
おなまえ	ふりがな	でんわ	( )
お買い上げの日より1年間に故障が発生した場合、保証規定のとおり保証いたします。お買い上げのお店にご連絡ください。本保証書のご提示がない場合には有料とさせていただきます。			
お問い合わせ先	<b>リオン株式会社</b> 本社・営業部 〒 185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41 リオネット補聴器お客様コールセンター フリーダイヤル 0120-2933-76 受付時間：9:00～21:00		

販売店名・印

## 使用上の注意

- 本器は 2.4 GHz 帯の周波数を使用します。この周波数帯では、さまざまな機器が使用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信距離が短くなったり、通信が切断したりします。本器の使用に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth 機器、無線 LAN 機器のいずれかの使用を中止してください。
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。

### <免責事項>

- 地震・雷・風水害および火災、第三者による行為その他の事故、お客さまの故意または過失誤用、その他異常な条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本器の使用または使用不能から生じる記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断などの付随的な損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。

### <お手入れについて>

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れにアルコールやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。ひび割れなど、変質のおそれがあります。

### <廃棄するときのお願い>

- ご使用済みの電池は、セロハンテープで電極を包んで、住んでいる自治体の指示に従って捨ててください。
- ご使用済みの本器の廃棄方法は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

### [保証規定]

- ① 無料修理[表記のお買い上げ年月日より 1 年間]  
保証期間中に故障が生じた場合、下記に該当するものを除き、無料修理させていただきます。
  - 保証書欄の記載がないもの。または書き換えられているもの。
  - 販売店名の印がないもの。
  - 取扱説明書によらない使い方をされたとき、あるいは改造されたとき。
  - お買い上げ以降のお客様の責任による故障。
  - 本体の部品、付属品、消耗品。
  - 天災地変(地震、噴火、風水害など)、不可抗力による故障。
- ② ご贈答品、ご転居などにより保証が受けられない場合は、弊社または販売店へご連絡ください。お近くのサービス店をご紹介します。
- ③ 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ④ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.)
- ⑤ 本保証書の提示がない場合は、有料となります。
- ⑥ 本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理など、ご不明の場合は、弊社または販売店までご連絡ください。

## 通信距離

通信距離：1 m<sup>\*</sup>

※ 弊社測定条件による

リモコンにより補聴器を操作できる距離は使い方により大きく変化します。  
たとえば、リモコンと補聴器の間に人体、家具、壁などの障害物があると通信できる距離は短くなる場合があります。

## 電池寿命

電池寿命(単 4 形アルカリ乾電池 LR03 使用時)：約 90 日

## 仕様

電源	単 4 形アルカリ乾電池 LR03：直流 (DC) 1.5 V <sup>*</sup>
使用温度・湿度範囲	温度：0~45℃ 湿度：30~85% (結露のないこと)
寸法・質量	95 (長さ) × 22 mm (直径：突起部を含まず) 24 g (電池を含まず)

※ ニッケル水素電池も使用できますが、アルカリ乾電池より電池寿命が短くなります。

- Bluetooth<sup>®</sup> ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、リオン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。



<https://www.rion.co.jp/>

本社・営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-2933-76

受付時間：9:00~21:00