

補聴器 HB-A5FA／FB／FC／FD 取扱説明書・使い方ガイド

- この取扱説明書は、上記の補聴器の使い方を記載しています。
- 補聴器の一般的な事項は、共通取扱説明書をお読みください。
- これらの取扱説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。
- これらの取扱説明書は、お読みいただいたあとも大切に保管してください。

初めに「スタート時間」の設定を確認してください。

スタート時間 : □早い／□遅い(7秒)／□遅い(10秒)
「遅い」に設定している場合、電池ホルダーを閉じてから、約7秒後(または約10秒後)に音が出ます。

No.68630

電池の入れ方



電池に貼られているシールをはがします。

- 電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。
- 電池はシールをはがして、1分以上経過してからご使用ください。



電池ホルダーを完全に開けます。

- メモリー切替ボタンを電池ホルダーと間違えて、無理に広げないでください。メモリー切替ボタンが壊れます。



電池ホルダーに電池を入れます。

- 電池はどちらの向きに入れても使用できます。

おまかせ
+ -



電池ホルダーをわずかに開けた状態にします。

ヒント

ハウリング(ピーピー音)が鳴らない場合やスタート時間を「遅い」にしている場合には、電池ホルダーを完全に閉じて結構です。

耳へのつけ方・電源の入れ方

ヒント ハウリング(ピーピー音)が鳴らない場合やスタート時間を「遅い」にしている場合には、電池ホルダーを完全に閉じてから耳へつけても結構です。

耳せんの場合

(写真はフック仕様ですが、Sチューブ仕様の場合も同様です。)



補聴器を耳にかけます。



フックの場合



Sチューブの場合

チューブの曲がったところをつまんで、耳せんをゆっくりと耳の穴に入れます。



電池ホルダーを完全に閉じて、電源を入れます。



フックの場合



Sチューブの場合

オーダーイヤチップまたはイヤモールドの場合

(写真はSチューブ仕様ですが、フック仕様の場合も同様です。)



Sチューブの場合



フックの場合

チューブの曲がったところをつまんで、オーダーイヤチップまたはイヤモールドをゆっくりと耳の穴に入れます。



補聴器を耳にかけます。



電池ホルダーを完全に閉じて、電源を入れます。



Sチューブの場合



フックの場合

電源の切り方・耳からの外し方



1

電池ホルダーをわずかに開けた状態にします。



フックの場合



Sチューブの場合

チューブの曲がったところをつまんで、ゆっくりと耳から外します。

電池の外し方

- 使わないときは必ず電池を外してください。



1

電池ホルダーを完全に開けます。




2

電池を外します。


「識別チップ(チャイルドロック)」が取り付けられている場合は、「HB-A5 共通取扱説明書」をご覧ください。

各部の名称

フック(標準)の場合

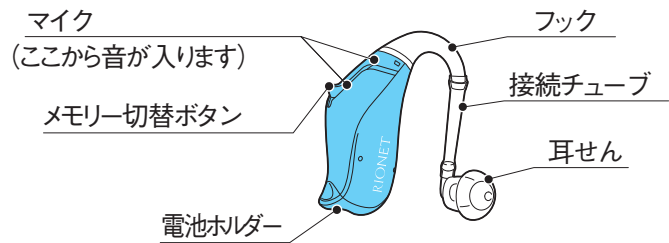

Sチューブ(オプション)の場合

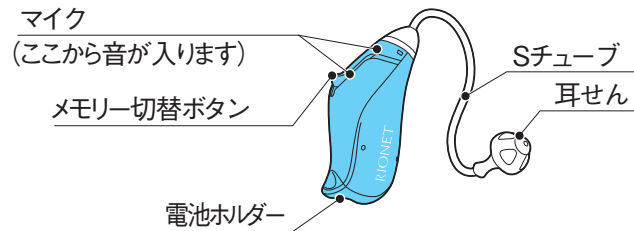

● 補聴器には、型式、製造番号が記載されています。

MEMO

.....
.....
.....

メモリー切替ボタンについて


メモリー切替ボタンを使うと、ボタン操作で補聴器のメモリーを切り替えたり、補聴器をミュートにできます。お買い求めのお店でご相談ください。

メモリーの切り替えについて

メモリーの意味、動作などについては、HB-A5 共通取扱説明書の「メモリーについて」をご覧ください。
メモリー切替ボタンを1秒以下の短い時間押すことで、補聴器のメモリーを切り替えます。

メモリー切替ボタンの押し方、2つの例


例1

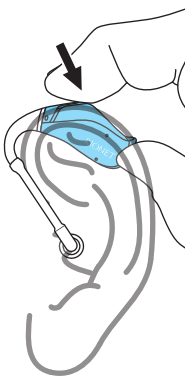

後頭部側から手を添えます。
電池ホルダーを親指で押えながら、
人差し指でメモリー切替ボタンを
押します。

例2

耳介

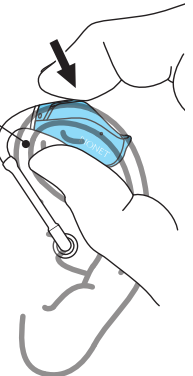

後頭部側から手を添えます。
耳介の内側から、耳介ごと親指で
補聴器を下から押えながら、
人差し指でメモリー切替ボタンを
押します。

● メモリー切替ボタンを、無理に引き上げると壊れます。

ミュートについて

この補聴器にはミュート機能を設定できます。ミュートにする／ミュートを解除する、を行うと次のようになります。

- メモリー切替ボタンを2秒以上押し続けると、ミュート(音が出ない状態)になります。
- ミュートを解除(音が出る状態)するには、以下のようになります。

ミュートを解除する方法	そのときのメモリー
メモリー切替ボタンを2秒以上押し続ける	ミュートになる前のメモリー
補聴器の電源を入れ直す	起動時のメモリー*

* :「お客様のメモリー設定」の起動時のメモリーになります。

MEMO

.....
.....
.....
.....

お客様のメモリー設定

機種ごとに設定できる最大のメモリー数は以下の通りです。

- ・HB-A5FA :6メモリー
- ・HB-A5FB / FC / FD :4メモリー

右 耳	
メモリー	調整状態
1	
2	
3	
4	
5	
6	

スタート時間 : ☐早い/☐遅い(7秒) / ☐遅い(10秒)
起動音 : ☐なし/☐シンプル/☐メロディ
ミュート機能 : ☐なし/☐あり
起動時のメモリー : ☐メモリー1 / ☐直前のメモリー*
おまかせテレホン : ☐なし/☐あり
切替音 : ☐なし/☐あり

* :「直前のメモリー」とは、「補聴器の電源を切る直前のメモリー」です。

左 耳	
メモリー	調整状態
1	
2	
3	
4	
5	
6	

スタート時間 : ☐早い/☐遅い(7秒) / ☐遅い(10秒)
起動音 : ☐なし/☐シンプル/☐メロディ
ミュート機能 : ☐なし/☐あり
起動時のメモリー : ☐メモリー1 / ☐直前のメモリー*
おまかせテレホン : ☐なし/☐あり
切替音 : ☐なし/☐あり

* :「直前のメモリー」とは、「補聴器の電源を切る直前のメモリー」です。

MEMO


.....
.....
.....
.....
.....

使い終わったら


補聴器のお手入れ

補聴器を長くお使いいただくために、日頃からのお手入れをお勧めします。

1 補聴器本体から電池を取り出します。

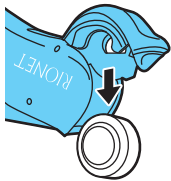

2 本体と電池についた汚れや水分を柔らかく乾いた布などで拭き取ります。

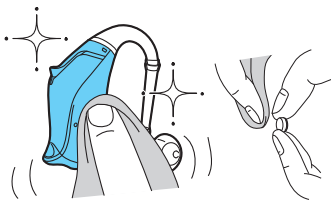

3 電池ホルダーの中も湿っていると錆びやすいので、綿棒などで水分を取ってください。



4 耳せんやオーダーイヤチップ、イヤモールドなどの掃除と保管の仕方は、HB-A5 共通取扱説明書を参照してください。

製造販売元

リオン株式会社 <https://www.rion.co.jp/>

本社／営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル：0120-2933-76

受付時間：9:00～21:00

医療機器認証番号：229AABZX00060A05(HB-A5FA)

医療機器認証番号：229AABZX00060A06(HB-A5FB)

医療機器認証番号：229AABZX00060A07(HB-A5FC)

医療機器認証番号：229AABZX00060A08(HB-A5FD)

認証番号は、携帯ケース及び外箱に表示してあります。

販売名：補聴器 HB-A5FA／補聴器 HB-A5FB／補聴器 HB-A5FC／
補聴器 HB-A5FD