

補聴器 HI-C1FA / FB / FC / FD 取扱説明書・使い方ガイド

- この取扱説明書は、上記の補聴器の使い方を記載しています。
- 上記の補聴器の一般的な事項は、共通取扱説明書をご覧ください。
- これらの取扱説明書を必ずご覧になり、正しくお使いください。
- これらの取扱説明書は、ご覧いただいたあとも大切に保管してください。

初めに「スタート時間」の設定を確認してください。

スタート時間 : □早い / □遅い(7秒) / □遅い(10秒)
「遅い」に設定している場合、電池ホルダーを閉じてから、約7秒後(または約10秒後)に音が出ます。
工場出荷設定は、「遅い(約7秒)」です。

No.68650

- オーダーメイド補聴器の形は、お客様の耳の形状によりさまざまなので、この取扱説明書の写真や説明文があてはまらないこともあります。

電池の入れ方・電源の入れ方

1



電池に貼ってあるシールをはがします。

- 電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。
- 電池はシールをはがして、1分以上経過してからご使用ください。

2



電池ホルダーを完全に開けます。

3



電池ホルダーに電池を入れます。

- 電池はどちらの向きに入れても使用できます。



4



電池ホルダーを半開きにします。

電源を入れるときは、電池ホルダーを完全に閉じます。

耳へのつけ方


ヒント 耳への装用を考えて、工場出荷設定は、「遅い(約7秒)」になっておりますが、ハウリング(ピーピー音)が気になる場合には、お買い求めのお店で、スタート時間を「遅い(約10秒)」にすることもできます。

左 耳



1

補聴器本体またはリングワイヤー(裏面の「各部の名称」参照)を持ちます。

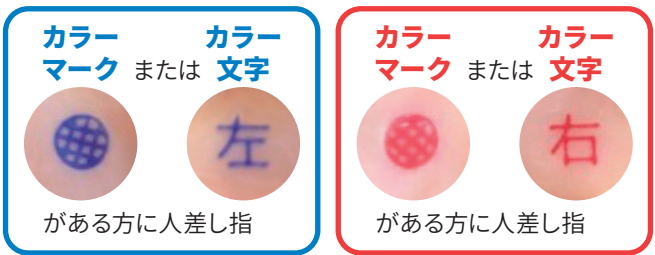

人差し指とは反対側に親指 人差し指とは反対側に親指

- カラーシェルの場合は白色のマークまたは白色の文字です。

2

人差し指を上にして、補聴器の音口の先端を、耳の穴の中に入れます。


- 耳の形状などによって、方法が異なることがあります。

右 耳



耳からの外し方・電源の切り方

1

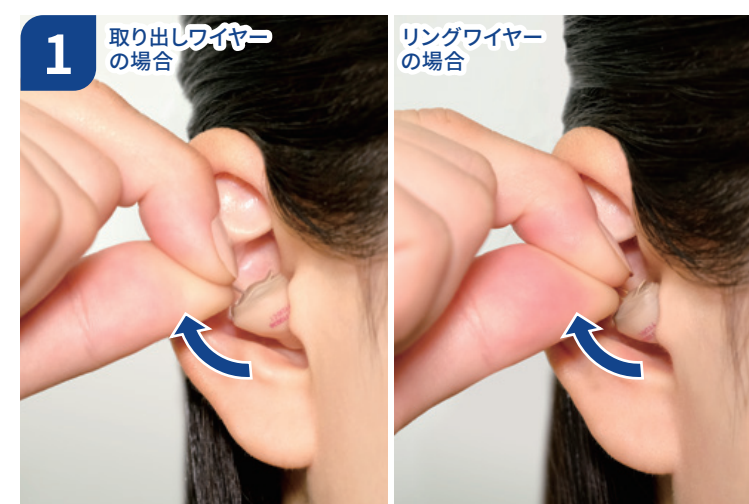

取り出しワイヤーまたはリングワイヤーをゆっくりと引いて、補聴器を取り出します。

- ベント^{*1}(通気穴)がついていない場合は、特にゆっくりと行ってください。
- 取り出すときは、ピーピーというハウリングがすることがあります。

*1: 「ベント」については、裏面の「各部の名称」をご覧ください。

2



電池ホルダーを半開きにします。

電池の外し方

- 使わないときは必ず電池を外してください。

1



電池ホルダーを完全に開けます。

2





電池を外します。



指で外す

付属の磁石棒を使う

各部の名称

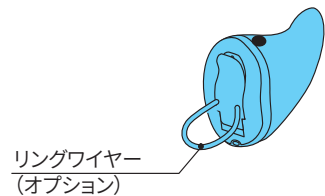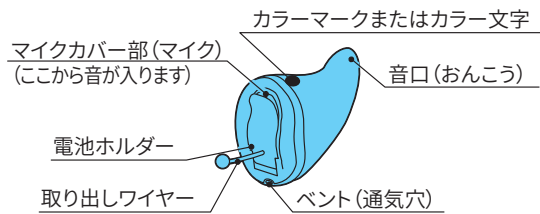

イラストは右耳用です

- 補聴器にはお客様のネーム、製造番号、型式が記載されています。
(右耳用は**赤字**、左耳用は**青字**(ただし、カラーシェルは除く))

MEMO

□磁気メモリー切替について


HI-C1FA/FBでは、磁気メモリー切替をお買い求めのお店で設定できます。

メモリーの切り替えは、以下のように行います。

- ① 磁石棒の先端を補聴器の電池ホルダーに軽く触れます*。
- ② すぐに磁石棒を離します。
- ③ 離す際に補聴器のメモリーが切り替わります。

*: 磁石棒の先端は電池ホルダーの中央部に触れてください。
電池ホルダーの端などに触れると、メモリーが切り替わらない場合があります。

先端を電池ホルダーに軽く触れる

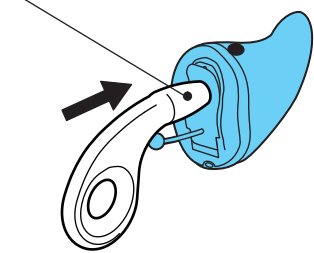

- 磁気メモリー切替は、おまかせテレホンとは一緒に設定できません。
- 磁気メモリー切替機能だけでメモリー切り替えする場合、補聴器の電源を入れ直した時には常にメモリー1で動作します。
- 受話器など、磁石棒以外の磁気にも反応することがあります。

メモリーについては、HI-C1/HI-C3 共通取扱説明書の「補聴器のメモリー」をご覧ください。


□メモリー切替ボタンについて

オプションのメモリー切替ボタンを使うと、ボタン操作で補聴器のメモリーを切り替えたり、補聴器をミュートにできます。お買い求めのお店にご相談ください。

メモリーの切り替えについて

メモリーの意味、動作などについては、HI-C1/HI-C3 共通取扱説明書の「補聴器のメモリー」をご覧ください。
メモリー切替ボタンを1秒以下の短い時間押すことで、補聴器のメモリーを切り替えます。

ボタンを押します

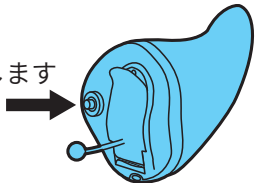

ミュートについて

この補聴器にはミュート機能を設定できます。ミュートにする／ミュートを解除する、を行うと次のようになります。

- メモリー切替ボタンを2秒以上押し続けると、ミュート(音が出ない状態)になります。
- ミュートを解除(音が出る状態)するには、以下のようになります。

ミュートを解除する方法	そのときのメモリー
メモリー切替ボタンを2秒以上押し続ける	ミュートになる前のメモリー
補聴器の電源を入れ直す	起動時のメモリー*

*: 「お客様のメモリー設定」の起動時のメモリーになります。

お客様のメモリー設定

機種ごとに設定できる最大のメモリー数は以下の通りです。

- ・HI-C1FA : 6メモリー
- ・HI-C1FB / FC / FD : 4メモリー

右 耳	
メモリー	調整状態
1	
2	
3	
4	
5	
6	

スタート時間 : □早い／□遅い(7秒) ／□遅い(10秒)
起動音 : □なし／□シンプル／□メロディ
ミュート機能 : □なし／□あり
磁気メモリー切替: □なし／□あり
おまかせテレホン: □なし／□あり
起動時のメモリー: □メモリー1／□直前のメモリー*
切替音 : □なし／□あり

*: 「直前のメモリー」とは、「補聴器の電源を切る直前のメモリー」です。

左 耳	
メモリー	調整状態
1	
2	
3	
4	
5	
6	

スタート時間 : □早い／□遅い(7秒) ／□遅い(10秒)
起動音 : □なし／□シンプル／□メロディ
ミュート機能 : □なし／□あり
磁気メモリー切替: □なし／□あり
おまかせテレホン: □なし／□あり
起動時のメモリー: □メモリー1／□直前のメモリー*
切替音 : □なし／□あり

*: 「直前のメモリー」とは、「補聴器の電源を切る直前のメモリー」です。


MEMO

補聴器のお手入れと保管

補聴器を長くお使いいただくために、日頃からのお手入れをお勧めします。


1 準備

補聴器本体から電池を取り出します。

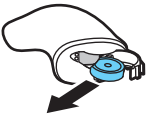


2 本体と電池のお手入れ

本体と電池についた汚れや水分を柔らかく乾いた布などで拭き取ります。

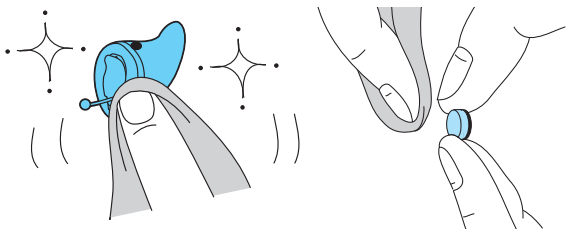

3 電池ホルダーのお手入れ

電池ホルダーの中も湿っていると電池が錆びやすいので、綿棒などで水分を取ってください。

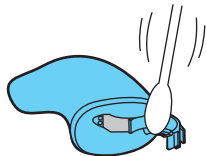

4 音口のお手入れと補聴器の保管について

音口のお手入れと補聴器の保管の仕方は、HI-C1/HI-C3 共通取扱説明書を参照してください。

製造販売元

リオン株式会社 <https://www.rion.co.jp/>

本社／営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル: 0120-2933-76

受付時間: 9:00~21:00

医療機器認証番号: 229AABZX00061A04(HI-C1FA)

医療機器認証番号: 229AABZX00061A05(HI-C1FB)

医療機器認証番号: 229AABZX00061A06(HI-C1FC)

医療機器認証番号: 229AABZX00061A07(HI-C1FD)

認証番号は、携帯ケース及び外箱に表示してあります。

販売名: 補聴器 HI-C1FA／補聴器 HI-C1FB／補聴器 HI-C1FC／補聴器 HI-C1FD