

補聴器 HI-G7FA／FB／FC／FD 取扱説明書・使い方ガイド

- この取扱説明書は、上記の補聴器の使い方を記載しています。
- 補聴器の一般的な事項は、共通取扱説明書をご覧ください。
- これらの取扱説明書を必ずご覧になり、正しくお使いください。
- これらの取扱説明書は、ご覧いただいたあとも大切に保管してください。

初めに「スタート時間」の設定を確認してください。

スタート時間 : □早い／□遅い(7秒) ／□遅い(10秒)
「遅い」に設定している場合、電池ホルダーを閉じてから、約7秒後(または約10秒後)に音が出ます。

No.68680

- オーダーメイド補聴器は耳の形で、さまざまです。そのためこの取扱説明書の写真や説明文が当てはまらないこともあります。

電池の入れ方

1



電池に貼ってあるシールをはがします。

- 電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。
- 電池はシールをはがして、1分以上経過してからご使用ください。

2



電池ホルダーを指先で完全に開けます。

3



電池ホルダーに電池を入れます。

- 電池はどちらの向きに入れても使用できます。

4



電池ホルダーを半開きにします。

ヒント

ハウリング(ピーピー音)が鳴らない場合やスタート時間を「遅い」にしている場合には、電池ホルダーを完全に閉じて結構です。

耳へのつけ方・電源の入れ方

ヒント ハウリング(ピーピー音)が鳴らない場合やスタート時間を「遅い」にしている場合には、電池ホルダーを完全に閉じてから耳へつけて結構です。

左 耳



1

補聴器を持ちます。


カラーマーク または カラー文字
左

がある方に人差し指

人差し指とは反対側に親指

- カラーシェルの場合は白色のマークまたは白色の文字です。

右 耳

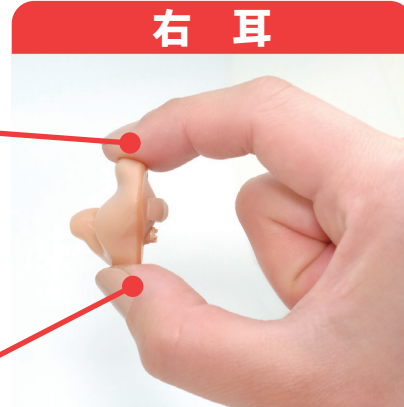

カラーマーク または カラー文字
右

がある方に人差し指

人差し指とは反対側に親指

2

人差し指を上にして、補聴器を前方に傾けるようにして持ち、補聴器の音口の先端を、耳の穴の中に入れます。

- 耳の形状などによって、方法が異なることがあります。



3

補聴器をゆっくりと後方に回しながら、押し込みます。

- 作業はゆっくりと行います。



4

補聴器の上と下をしっかりと押し込みます。



5

電池ホルダーを完全に閉じると、電源が入り、補聴器から音が出ます。



電源の切り方・耳からの外し方

1



電池ホルダーを半開きにして、電源を切ります。

2




補聴器の上の部分を左の写真のように耳から浮かし、矢印のように前方に回しながら外します。

- 作業はゆっくりと行います。

電池の外し方

- 使わないときは必ず電池を外してください。

1

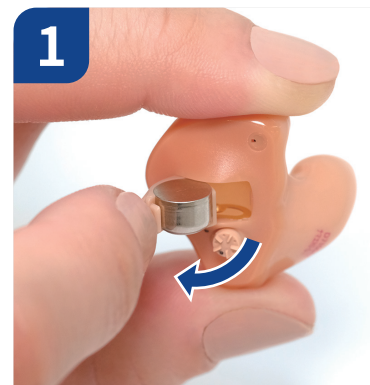


電池ホルダーを完全に開けます。

2




電池を外します。

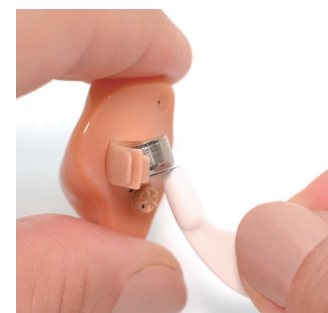

指で外す

付属の磁石棒を使う

各部の名称


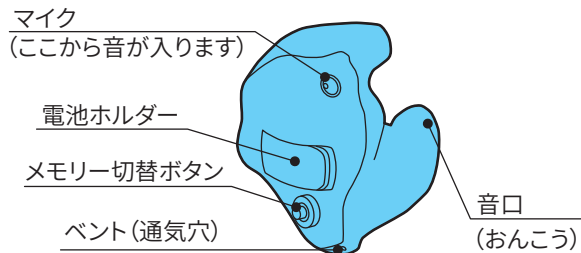


- 補聴器にはお客様のネーム、製造番号、型式が記載されています。（右耳用は赤字、左耳用は青字（ただし、カラーシェルの除く））
- 電池ホルダーを開けた内部にも左右を区別する色がついています。（右耳用は赤、左耳用は青（ただし、カラーシェルは除く））
- イラストは標準的な仕様のもをを表しています。各種オプションをご利用いただいた場合は、イラストと異なる場合があります。
- お客様の耳の形によって、ベントはつかない場合や、位置が変わることがあります。
- マイクの位置は変わる場合があります。

MEMO

□ボリューム（オプション）について

補聴器のボリュームを、矢印の方向に回すにしたがい、音が大きくなります。
ボリュームは、指の腹で軽く押さえながら回してください。

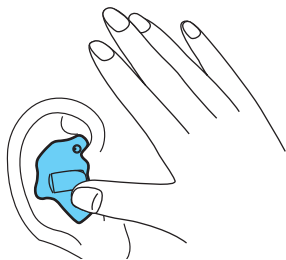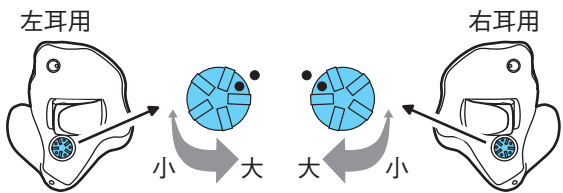


- 相手の話し声の大きさや環境に応じて、調整をしてください。
- スイッチ付ボリューム（オプション）をご使用の場合は、ボリューム最小で電源が切れます。

□メモリー切替ボタン（標準）について

メモリー切替ボタンを使うと、ボタン操作で補聴器のメモリーを切り替えたり、補聴器をミュートにできます。お買い求めのお店にご相談ください。

メモリーの切り替えについて

メモリーの意味、動作などについては、HI-C7 共通取扱説明書の「メモリーについて」をご覧ください。
メモリー切替ボタンを1秒以下の短い時間押すことで、補聴器のメモリーを切り替えます。

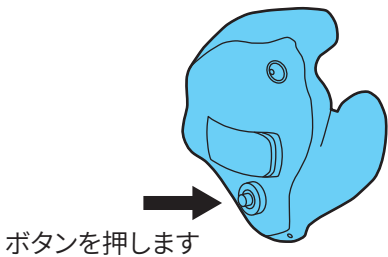

ミュートについて

この補聴器にはミュート機能を設定できます。ミュートにする／ミュートを解除する、を行うと次のようになります。

- メモリー切替ボタンを2秒以上押し続けると、ミュート（音が出ない状態）になります。
- ミュートを解除（音が出る状態）するには、以下のようになります。

ミュートを解除する方法	そのときのメモリー
メモリー切替ボタンを2秒以上押し続ける	ミュートになる前のメモリー
補聴器の電源を入れ直す	起動時のメモリー*

*：「お客様のメモリー設定」の起動時のメモリーになります。

MEMO

お客様のメモリー設定

機種ごとに設定できる最大のメモリー数は以下の通りです。

- HI-G7FA :6メモリー
- HI-G7FB / FC / FD :4メモリー

右 耳	
メモリー	調整状態
1	
2	
3	
4	
5	
6	

スタート時間 : □早い／□遅い(7秒) / □遅い(10秒)
起動音 : □なし／□シンプル／□メロディ
ミュート機能 : □なし／□あり
起動時のメモリー : □メモリー1 / □直前のメモリー*
おまかせテレホン : □なし／□あり
メモリー切替音 : □なし／□あり

*：「直前のメモリー」とは、「補聴器の電源を切る直前のメモリー」です。

左 耳	
メモリー	調整状態
1	
2	
3	
4	
5	
6	

スタート時間 : □早い／□遅い(7秒) / □遅い(10秒)
起動音 : □なし／□シンプル／□メロディ
ミュート機能 : □なし／□あり
起動時のメモリー : □メモリー1 / □直前のメモリー*
おまかせテレホン : □なし／□あり
メモリー切替音 : □なし／□あり

*：「直前のメモリー」とは、「補聴器の電源を切る直前のメモリー」です。

MEMO

補聴器のお手入れと保管

補聴器を長くお使いいただくために、日頃からのお手入れをお勧めします。


1 準備

補聴器本体から電池を取り出します。




2 本体と電池のお手入れ

本体と電池についた汚れや水分を柔らかく乾いた布などで拭き取ります。

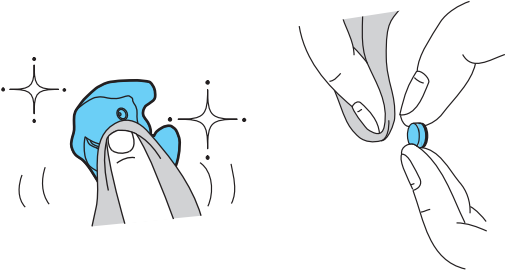

3 電池ホルダーのお手入れ

電池ホルダーの中も湿っていると電池が錆びやすいので、綿棒などで水分を取ってください。

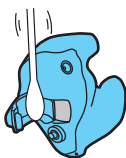

4 音口のお手入れと補聴器の保管について

音口のお手入れと補聴器の保管の仕方は、HI-G7 共通取扱説明書を参照してください。

製造販売元

リオン株式会社 <https://www.rion.co.jp/>

本社／営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル：0120-2933-76

受付時間：9:00～21:00

医療機器認証番号：229AABZX00067A04(HI-G7FA)
医療機器認証番号：229AABZX00067A05(HI-G7FB)
医療機器認証番号：229AABZX00067A06(HI-G7FC)
医療機器認証番号：229AABZX00067A07(HI-G7FD)
認証番号は、携帯ケース及び外箱に表示してあります。
販売名：補聴器 HI-G7FA／補聴器 HI-G7FB／補聴器 HI-G7FC／補聴器 HI-G7FD