



充電ケース

HX-A8

取扱説明書

安全上／使用上のご注意

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いにより生じるおそれがある内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

図の中に具体的な禁止内容が表記されることがあります。

	禁止内容		指示内容
---	------	---	------

表示	表示の意味
 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。
 ノート	安全には直接影響しませんが、本器の機能を正しく活用するためのアドバイスを記載しています。

■植込み型医療機器をご使用の方へ

警告



植込み部位に対して充電ケースを密着させない。

充電ケースは電波を発します。植込み型医療機器（植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器）を使用している方は、植込み部位に対して充電ケースを密着させないでください。植込み型医療機器に異常が生じるおそれがあります。

■一般的な取り扱いについて

警告



火中への投入はしない。

破裂するおそれがあります。

分解はしない。

充電ケースに金属などの異物を入れない。

火災、故障の原因となります。

注意



本器には必ず付属の AC アダプターと AC アダプター用ケーブルを使用する。

市販の AC アダプターやコンピュータの USB 端子には接続しないでください。発火や感電などのおそれがあります。

濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしない。

感電などの原因となります。



高温になる場所に放置しない。

発火や感電などの原因となります。

取り扱いと保管上の注意

- 補聴器を充電ケースにセットする前に、補聴器と充電ケースの汚れや水分を乾いた布などで拭き取ってください。
- 充電ケースについた汚れや水分は、乾いた布などで拭き取ってください。
- 補聴器を入れた状態で充電ケースを落とすと、充電ケースにセットした補聴器が外れるおそれがあります。補聴器が外れた際は、補聴器をセットし直してください。
- 補聴器を左右逆にセットしないでください。Eワイヤーが変形し、故障するおそれがあります。
- 補聴器の電源を入／切するときは、必ず充電ケースで行ってください。
- 充電中には充電ケースに磁気記録媒体（フロッピーディスク、各種カード類、磁気テープ、プリペイドカード、切符など）を近づけないでください。充電中は充電ケースから磁場が発生するため、磁気記録媒体が故障するおそれがあります。
- 補聴器に、充電ケース以外の強力な磁石を近づけないでください。故障するおそれがあります。

免責事項

- 地震・雷・風水害および火災、第三者による行為その他の事故、お客さまの故意または過失誤用、その他異常な条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 充電ケースの使用または使用不能から生じる記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断などの付随的な損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。

廃棄するときのお願い

- 充電ケースの廃棄方法は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

商標について

- 本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

もくじ

安全上／使用上のご注意	2
安全上のご注意	2
取り扱いと保管上の注意	5
免責事項.....	6
廃棄するときのお願い.....	6
商標について.....	6
1 充電ケースにできること	9
2 各部の名称	10
3 付属品	11
4 補聴器の電源の入／切	12
5 充電	13
5.1 充電について	13
5.2 充電方法	14
6 充電ランプの表示	17
7 保管・持ち運び	18

8 お手入れ	19
9 仕様	20

1 充電ケースにできること


本器は用途に使えます。

- 電源の入／切
- 補聴器の充電
- 保管・持ち運び


9

2 各部の名称

正面

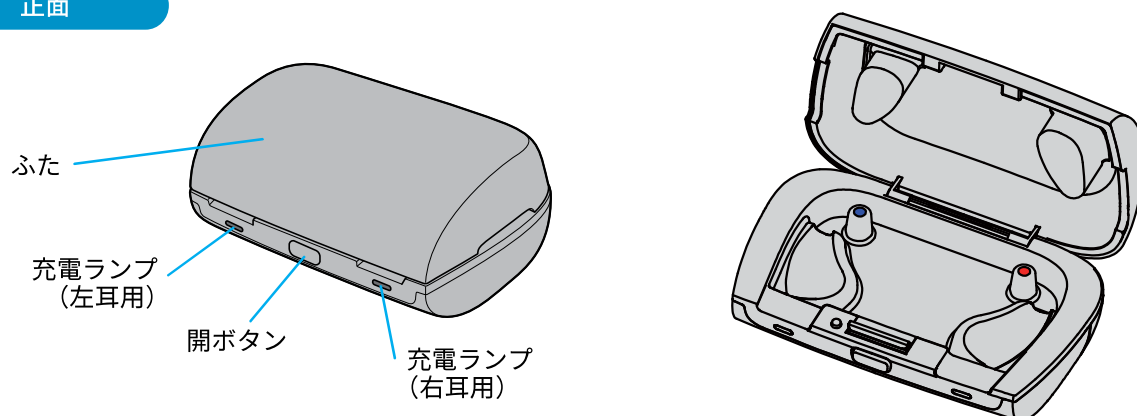

背面

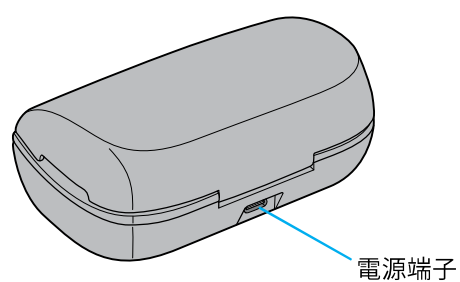


3 付属品

- 安全上のご注意
- AC アダプター用ケーブル
- AC アダプター

左右の識別について

右耳用の補聴器は充電ケースの右側に、左耳用の補聴器は充電ケースの左側にセットしてください。

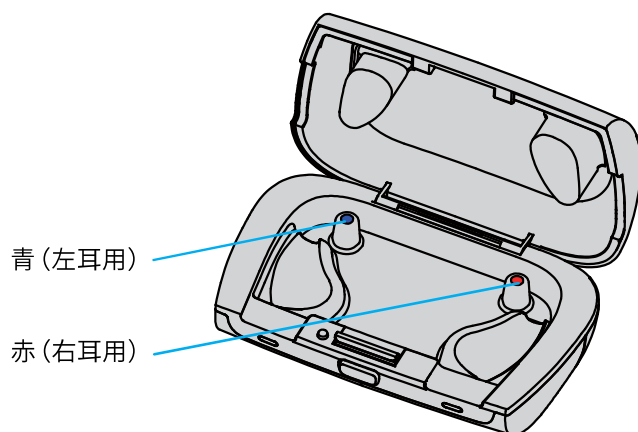


11

4 補聴器の電源の入／切


充電ケースによって、補聴器の電源を入／切します。

充電ケースに補聴器をセットすると電源が切れます。充電ケースにセットされた補聴器を取り外すと電源が入ります。

補聴器を充電ケースから取り外す

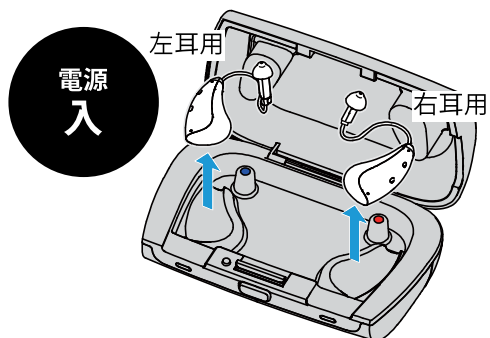

補聴器を充電ケースにセットする

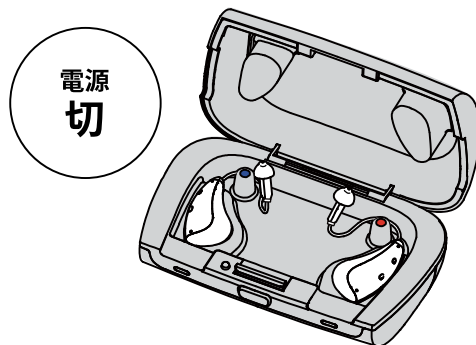

補聴器の電源を入／切するときは、必ず充電ケースで行ってください。

目ノート

補聴器を使用しないときは、充電ケースにセットしてください。

5 充電

5.1 充電について

補聴器をお使いになる前や電池残量が少なくなったときは、充電してください。

電池残量が少なくなったときは、補聴器からオシラセ音が出ます（補聴器の設定による）。

オシラセ音については、補聴器 HB-A8 共通取扱説明書（web に掲載）をご覧ください。

● 充電時間

最大 約 4 時間[※]

● 満充電後の連続使用時間

通常 約 34 時間（イヤホン小）[※]、約 36 時間（イヤホン中）[※]

ストリーミング時 約 16 時間（イヤホン小）[※]、約 16 時間（イヤホン中）[※]


※ 新品の充電電池の場合

周囲温度が高すぎる、または低すぎると充電できない場合があります。

使用温度範囲は 0～45℃です（推奨 7～35℃）。

充電

5.2 充電方法

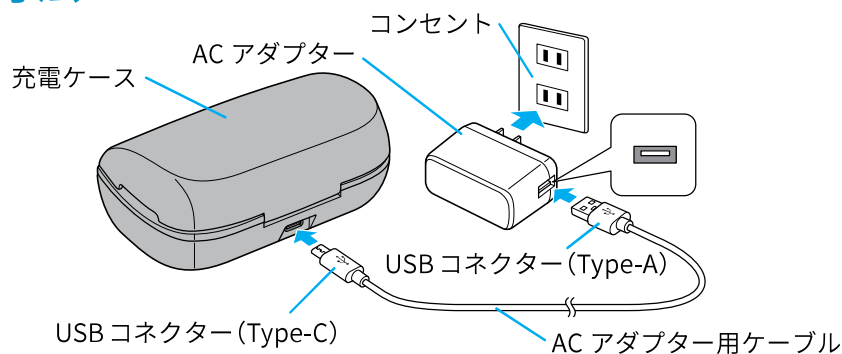


充電ケースには必ず付属の AC アダプターと AC アダプター用ケーブルを使用してください。
市販の AC アダプターやコンピュータの USB 端子には接続しないでください。発火や感電などのおそれがあります。

- 1 AC アダプター用ケーブルの USB コネクタ (Type-A) を AC アダプターに差し込みます。
- 2 AC アダプター用ケーブルの USB コネクタ (Type-C) を充電ケースに差し込みます。
- 3 AC アダプターをコンセントに差し込みます。

4 補聴器を充電ケースにセットします。

右耳用の補聴器は充電ケースの右側に、左耳用の補聴器は充電ケースの左側にセットしてください。

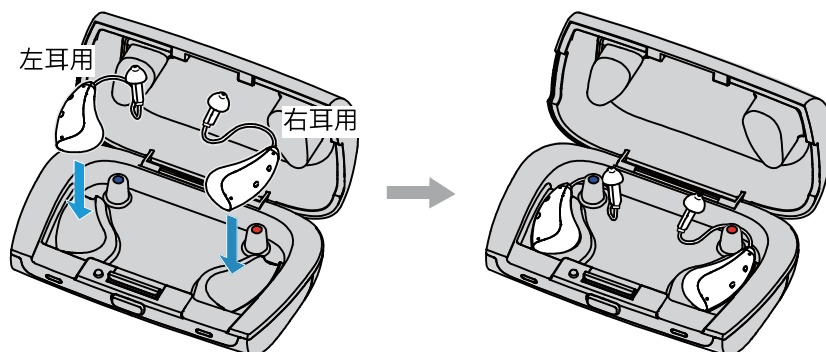

15


5 充電ケースのふたを閉じると、充電が開始されます。

充電中は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。

充電が完了すると、充電ランプが青色に点灯します。

充電が完了後、そのまま放置しても問題ありません。

充電時間目安：最大約 4 時間

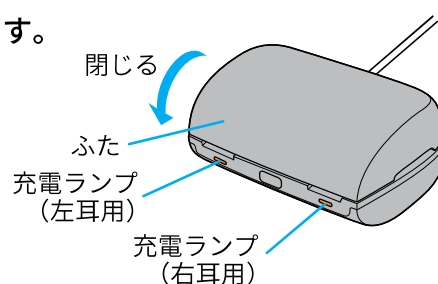

目ノート

充電ケースに補聴器をセットしてふたを閉じても、充電ランプが点灯しなかったり、点滅したりする場合は、以下の点を確認してください。

- ふたが閉まっている
- ケーブルが接続されている
- 補聴器が充電ケースに正しくセットされている

なお、左右の補聴器は調整状態や使用環境により電池残量に差が生じるため、左右の充電ランプは異なった動作をするおそれがあります。

6 充電ランプの表示


ランプの表示	状態	対応
オレンジ 点灯	充電中	
青 点灯	充電完了	
消灯	充電されていない	以下の点を確認してください ・ ふたが閉まっている ・ ケーブルが接続されている ・ 補聴器が充電ケースに正しくセットされている それでも症状が改善されない場合は、お買い求めのお店にご相談ください
オレンジ 点滅	充電エラー（ふたを開けたら消灯の場合）	以下の順に確認してください ・ 補聴器をセットし直して再充電する ・ 充電ケースの置き場所を変えて再充電する それでも症状が改善されない場合は、お買い求めのお店にご相談ください
	故障の可能性（ふたを開けても点滅の場合）	お買い求めのお店にご相談ください

17

7 保管・持ち運び


補聴器を使わないときや持ち運ぶときは、充電ケースに保管してください。

右耳用の補聴器は充電ケースの右側に、左耳用の補聴器は充電ケースの左側にセットしてください。

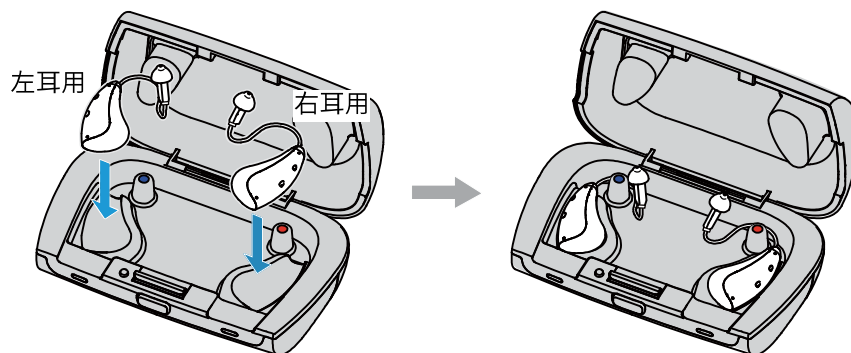

8 お手入れ

補聴器のお手入れの仕方は、補聴器の取扱説明書をご覧ください。
充電ケースについた汚れや水分は、乾いた布などで拭き取ってください。

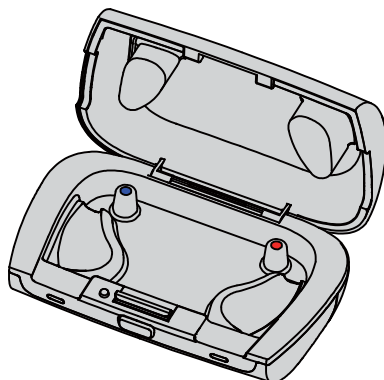

19

9 仕様

補聴器充電時間	最大 約 4 時間	
使用温度範囲	0～45℃（推奨 7～35℃） ※ 推奨温度範囲外では、充電時間が長くなります。	
本体の寸法	約 64 × 104 × 41 mm	
本体の質量	約 90 g (AC アダプター・AC アダプター用ケーブルを含まず)	
AC アダプター (待機消費電力0.3 W以下)	電源	AC 100～240 V 50/60 Hz
	入力容量	10 VA (100 V)、13 VA (240 V)
	DC 出力	5.0 V、800 mA
AC アダプター表示記号		クラス II 機器 (二重絶縁構造)
	～	AC (交流)
	≡	DC (直流)

製造販売元



本社／営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-2933-76

受付時間：9:00～21:00

No. 67870