

RIONET CONNECT

リオネットコネクトアプリ
かんたんガイド



初めにお読みください

● **本アプリでできること**
本アプリをインストールすることで、スマートフォン（以下、スマホ）またはタブレットを補聴器のリモコン代わりにお使いいただけます。

リオネットコネクトアプリを使える補聴器

HB-T1D、HB-T1E、HB-T1S、HB-T2H

Bluetooth機能を搭載した機種、より上位機種、片耳よりも両耳装用の方がリオネットコネクトアプリで利用できる機能はより多くなります。

- **注意事項**
- ※ 端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります。
 - ※ 特にAndroid端末に関しては、端末の種類によっては本アプリが正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。
 - ※ スマホ等端末の通話音声や動画・音楽の再生音を補聴器で直接聞くことができる「ダイレクトストリーミング」機能も利用できる場合があります。ただし、これはスマホ等端末の機能であり、リオネットコネクトアプリには含まれません。リオネットコネクトアプリが正常に利用できる場合であっても、ダイレクトストリーミングは利用できない場合があります。予めご了承ください。

ダイレクトストリーミングに必要なスマホ等端末の仕様：
Android端末は多様な種類があり、Bluetooth® LE Audio/ASHA対応であっても、端末のメーカーが定める仕様や搭載OSバージョンにより、下表の要件を満たしていてもダイレクトストリーミングを利用できない場合があります。
ダイレクトストリーミングの設定についての詳細は、スマホ等端末のメーカーまたは販売元までご確認ください。

端 末	端末要件	補聴器対応機種
iPhone (Made for iPhone)	iPhone 11以降かつ iOS 15.2以降の端末	HB-T1D、HB-T1E、HB-T1S
Android (ASHA)	Android OS 11以上かつ ASHA規格対応の端末	HB-T1D、HB-T1E、HB-T1S

※ 本書に掲載した操作画面や画面構成は予告なく変更される場合があります。
またOSバージョンによっても画面が異なる場合があります。
※ iPad、iPhoneはApple inc.の登録商標です。
※ Google、Android、Google Play は、Google Inc.の商標です。
※ Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、リオン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

1 リオネットコネクトアプリの
ダウンロード・インストール

- ① お使いのスマホでApp Store/Google playストアを開きます。
- ② 検索ウィンドウに「リオネット補聴器」と入力します。
- ③ リオネットコネクトアプリを入手してください。




補聴器の準備
補聴器の電源をオフにします。
空気電池を使用する補聴器の場合は、新しい電池を電池ホルダーに入れ、電池ホルダーを開けておきます。
※ 電源のオンオフは、補聴器の取扱説明書をご覧ください。

- iPhoneのBluetoothペアリングの場合、**2** へお進みください。
- AndroidのBluetoothペアリングの場合、**3** へお進みください。
- Bluetooth非搭載の補聴器、または、Bluetooth非対応のスマホ等端末をご使用の場合、**4** へお進みください。

2 Bluetoothペアリングの準備
(iPhoneの場合)

- ① **Bluetooth機能をオン**
画面をスワイプしてコントロールセンターを表示します。Bluetoothアイコンをタップします。
(下図のアイコンをオン（青色）の状態にします。)

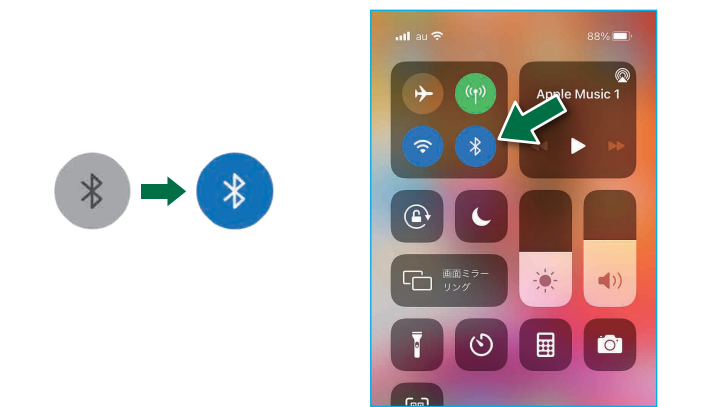

② 補聴器の検出

【設定】>【アクセシビリティ】をタップします。




補聴器の電源をオフ => オンします。
※電源のオンオフは、補聴器の取扱説明書をご覧ください。

【ヒ어링デバイス】または【MFi補聴器】をタップします。
補聴器の検出が自動的に開始されます。



③ 補聴器の再起動

補聴器の電源をオフ => オンします。
※ 電源のオンオフは、補聴器の取扱説明書をご覧ください。

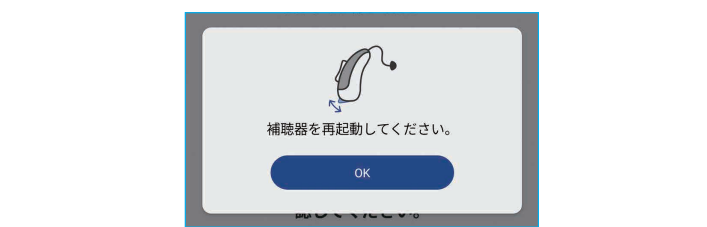

④ 補聴器を接続する

表示された補聴器をタップします。



③ Bluetoothペアリング

検出が完了すると**補聴器名**および**左右**が表示されます。
※片耳または両耳の補聴器が正しく検出されない場合は、前の画面に戻り、手順**②**の電源のオンオフからやり直します。
スマホの再起動も正しい検出に効果があります。
併せてお試しください。



【補聴器名】をタップすると下図ダイアログボックスが表示されます。
【ペアリング】をタップします（）（下図-**図-A**）。
（両耳の場合、ダイアログボックスが2回表示されます）




「しばらくお待ちください」と表示されます。



⑤ 接続に成功しました

【**ここをタップ**】をタップします。

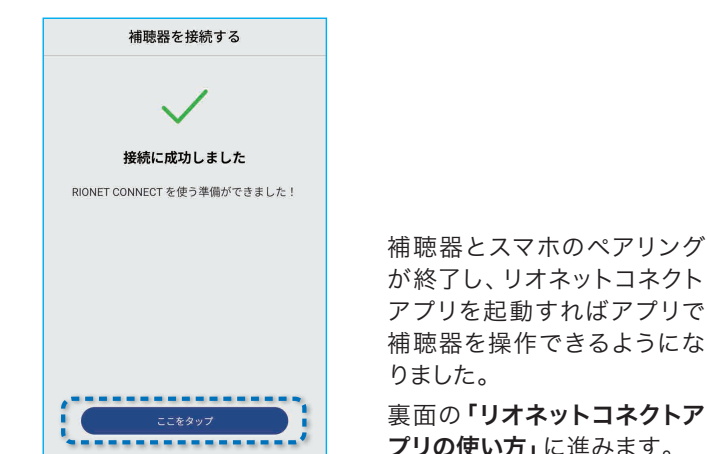

補聴器とスマホのペアリングが終了し、リオネットコネクトアプリを起動すればアプリで補聴器を操作できるようになりました。
裏面の「リオネットコネクトアプリの使い方」に進みます。

4 Bluetoothを使わないペアリング (音を利用)

●Bluetoothを搭載していない機種等の場合、高周波音を使ってペアリング・補聴器の操作を行います。

1 リオネットコネクトアプリを開きます。



2 「その他(上記以外の場合)」を選択

ホーム画面で【その他】をタップします。



3 接続の準備


補聴器の電源を オフ ⇒ オンします。

※ 電源のオンオフは、補聴器の取扱説明書をご覧ください。


iPhone の場合、【接続する】をタップします。

Android の場合、「メディア」を選択して、【接続する】をタップします。

iPhone の場合

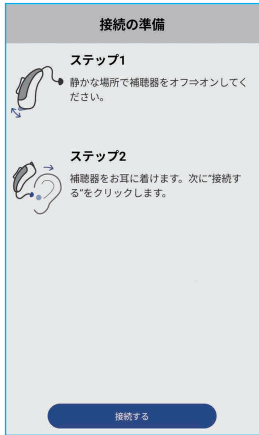


Andoroid の場合

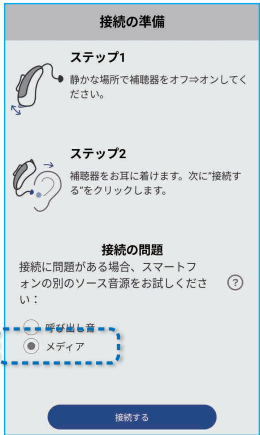


【接続する】をタップすると、ペアリングのための信号音 (非常に高い周波数で多くの場合ほとんど聞こえないような特殊な信号音波) がスマホから出ます。予め次のことに注意してください。

- ◎ スマホの音量設定がミュートではなく音の出る状態であること
- × スマホにヘッドホン端末、Bluetooth 端末等が接続されていないこと

下図のように「音量が小さ過ぎます」と表示される場合には「十分な音量です」の表示になるまでスライダーを右に動かしてください。

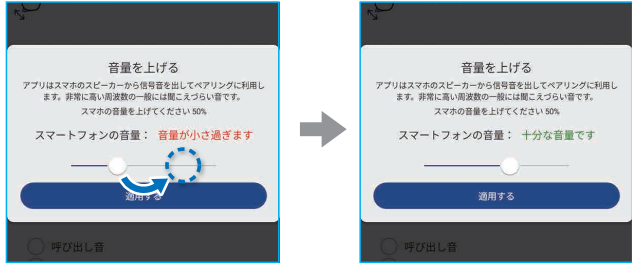

Android の種類によっては、上記の操作をしても接続できない場合があります。その場合、下図のように「呼び出し音」を選択して【接続する】をお試しください。

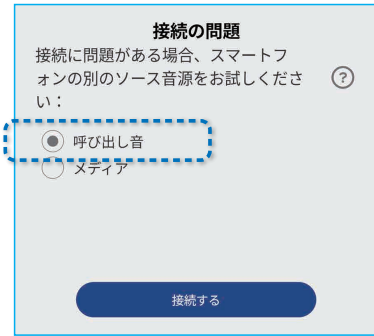


※ 「呼び出し音」の場合、マナーモード/サイレントモードではアプリの操作ができなくなります。

4 確認音

補聴器から確認のための電子音が聞こえたら【はい】をタップします。


(聞こえなければ【いいえ】をタップし、2 からやり直してください。)

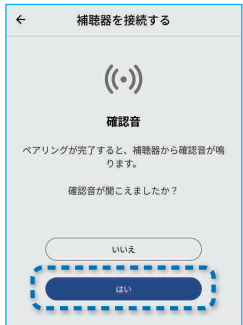

5 プログラム数


販売店が設定したプログラム数をタップします。

※ 不明の場合は【わからない】をタップします。「1プログラム」で設定されます。

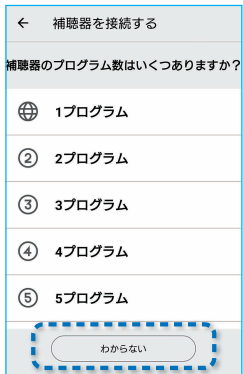


6 耳鳴り治療用プログラム

医師の指導のもとに利用するものです。通常は【いいえ】をタップします。

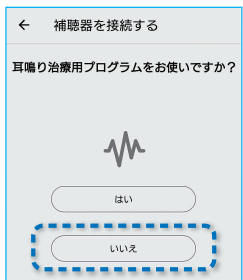

7 お使いの補聴器は指向性機能をサポートしていますか？

【いいえ】をタップします。

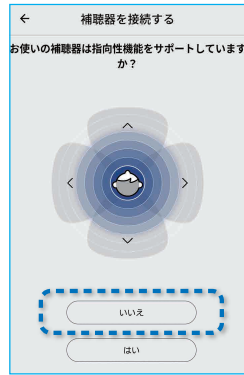

8 接続に成功しました


【ここをタップ】をタップします。



リオネットコネクトアプリの使い方

●「リモコン機能」画面


※ 下図の各機能アイコンはお使いの補聴器の機種・片耳／両耳によっては表示されない項目があります。

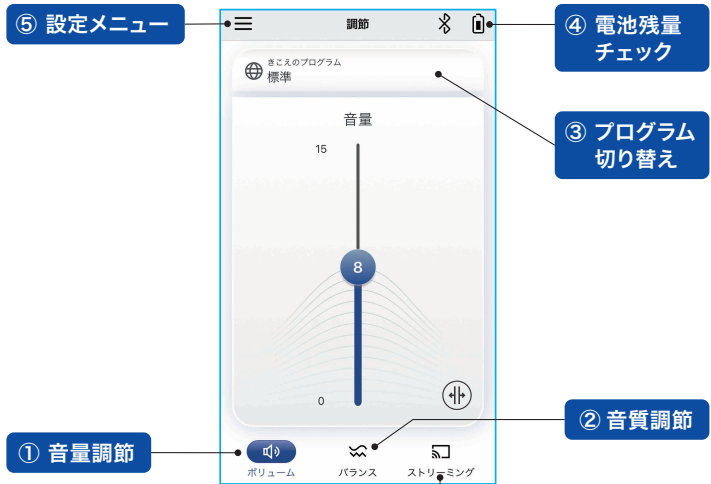


Bluetooth ダイレクトストリーミング

別売品テレビサウンドからの音声ダイレクトストリーミングされます。
【ストーリーミング】をタップした後に表示される画面で「再生」をタップすると、音が再生されます。「停止」をタップすると、音が停止します。
ストーリーミングの音量調整バーで、テレビサウンドからの音量を上げ下げできます。
※ すべての機種で表示されるものではありません。

1 音量調節

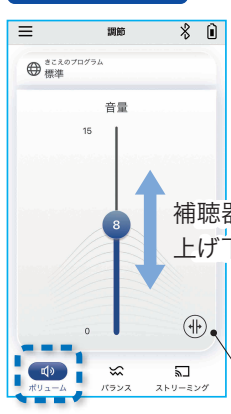


● 両耳装用で Bluetooth ペアリングの場合のみ、左右音量の独立操作も可能です。

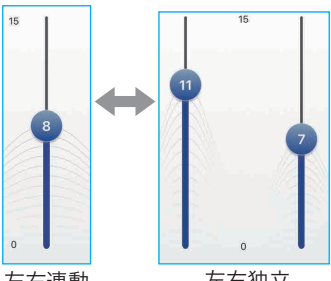

このボタンをタップして切り替えます

2 音質調節

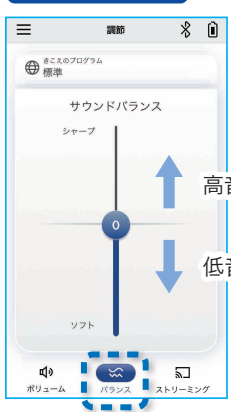

高音を強調します
低音を強調します


3 プログラム切り替え

下図は3つのプログラムを持つ補聴器の例です。変更したいプログラムをタップすると、切り替えることができます。

- Bluetooth ペアリング
プログラムの名称が表示されます
- その他の方法 (音を利用) でペアリング
プログラム番号が表示されます




- 複数のプログラムを利用する場合、名称を変更できる場合があります
- [1] 変更したいプログラムをタップします (本例では【標準】)。
 - [2] この時、画面右上に ✎ マークが表示されれば、これをタップして変更が可能です (本例では【家にいる時】という名称に変更)。
 - [3] 保存するには 保存マークをタップします。

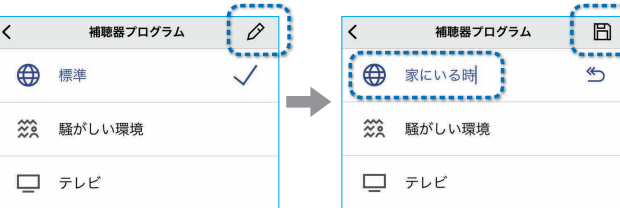


4 電池残量チェック

補聴器の電池残量をだまかに知ることができます。

● Bluetooth ペアリング

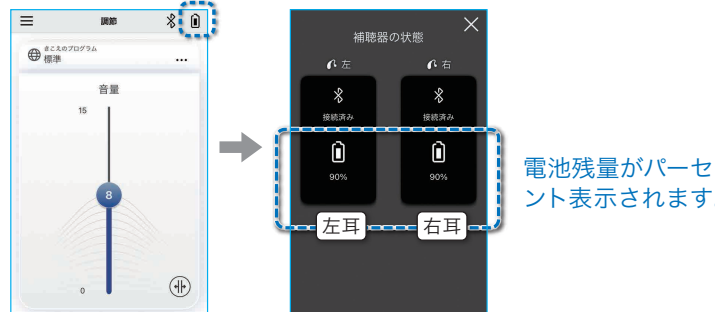


● その他の方法 (音を利用) でペアリング または、Bluetooth がオフ状態

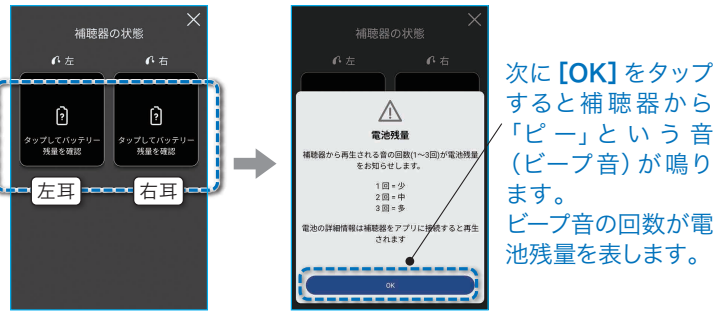


ビープ音の回数	1回	2回	3回
電池残量	かなり少ない	半分程度	十分にあります

●もう一度ペアリングを行うには

5 設定メニュー

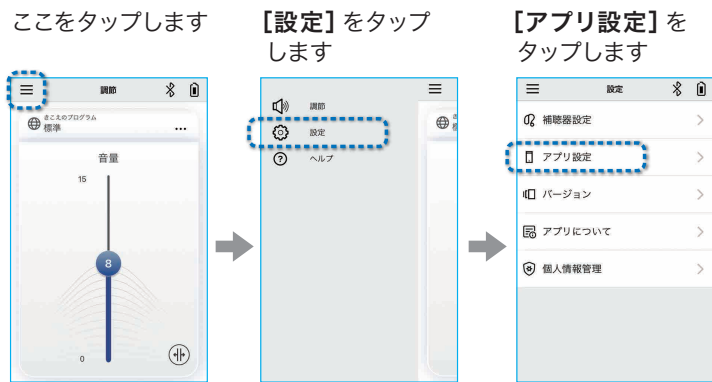

「接続の設定」を
タップします

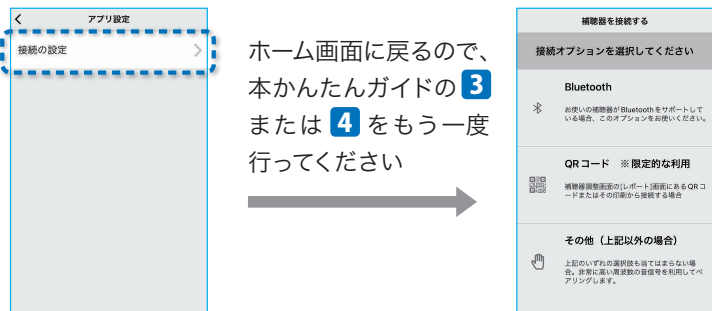

ホーム画面に戻るので、
本かんたんガイドの 3
または 4 をもう一度
行ってください